



Окклюдер Figulla Flex II PFO

ИМ-7.109540

Классификационный код: 32.50.13.100

Производитель: Occlutech

Технические характеристики:

Тип.....ДМПП

Назначение.....закрытие открытого овального окна

Материал.....нитиноловая проволока

Размер.....7F / 9F / 11F

Поставщики

Сотрамед, ООО
 190943041

Договорная цена

Описание

Окклюдер Figulla Flex II PFO – используется для закрытия такого дефекта сердца как открытое овальное окно у пациентов со сбросом крови «справа налево» и при наличии «криптогенной» парадоксальной тромбоэмболии.

Описание

Окклюдер Figulla Flex II PFO выполнен из нитиноловой проволоки со свойством «запоминания формы». Гибкая талия соединяет два диска, которые обеспечивают удержание устройства в дефекте. Форма талии обеспечивает полное закрытие дефекта после развертывания окклюдера. Две тонкие вставки из ПЭТ обеспечивают быструю герметизацию дефекта предсердной перегородки и в то же время способствуют врастанию окклюдера в окружающие ткани.

Особенности:

- Уникальное шаровое соединение между толкателем и окклюдером надежно фиксирует окклюдер и позволяет провести его к месту имплантации. По достижении

нужного места окклюдер легко и быстро отсоединяется.

- Биосовместимая прокладка из ПЭТ позволяет быстро проверить правильность постановки устройства и закрытия дефекта под контролем УЗИ или рентгеноскопии. Нитиноловая проволока с покрытием из оксида титана обладает превосходной биосовместимостью и минимальным выделением никеля.
- Улучшенное плетение: на диске, предназначенном для левого предсердия, отсутствуют выступы, что гарантирует хорошее врастание тканей.

Кат. №	Размер дефекта (мм)	∅ диска ЛП (мм)	∅ диска ПП (мм)	Система доставки
60PLD04W	$8 < Д \leq 13$	23	25	9F
60PLD05W	$Д \leq 8$	16	18	7F
60PLD06W	$8 < Д \leq 13$	23	25	9F
60PLD07W	$13 < Д \leq 15$	27	30	9F
62PLD03T	$15 < Д \leq 18$	31	35	11F

Анимационное видео о процедуре имплантации окклюдера Figulla Flex II PFO