



## Кожный клей для ран Dermabond

ИМ-7.98042/2103

Классификационный код: 32.50.50.310

Производитель: Ethicon Inc.

### Технические характеристики:

Объем.....	0.36 мл / 0.5 мл / 0.75 мл
Стерильный.....	да
Самопроизвольное отшелушивание.....	7-10 дней
Длина раны.....	5-7 / 10-12 / 12-15 / 22-25 см
Состав.....	мономерное (2-октилцианоакрилат) соединение и краситель D&C Violet №2 (фиолетовый)

### Описание

Кожный клей Dermabond – маловязкий биологический клей для местного применения. Дермабонд в комбинации с внутрикожным швом показан для закрытия кожных ран в общей хирургии, сердечно-сосудистой, торакальной хирургии, а также в акушерстве и гинекологии.

Основные результаты:

- блокирует проникновение бактерий, вызывающих местные инфекционные процессы;
- обеспечивает отличные косметические результаты.

Описание:

Клей Дермабонд (Dermabond) – стерильный жидкий кожный клей для местного нанесения, содержащий мономерное (2-октилцианоакрилат) соединение и краситель D&C Violet № 2 (фиолетовый). Исследованиями in vitro установлено, что кожный клей Дермабонд (Dermabond) выполняет функцию барьера на пути микробного проникновения до тех пор, пока адгезивная пленка остается влажной.

Показания:

Кожный клей Дермабонд (Dermabond) предназначен для местного применения, только в целях удержания в контакте легко сопоставимых краев ран, таких как, например,

хирургические разрезы и точки введения инструментов при миниинвазивных вмешательствах, а также простые, тщательно очищенные травматические повреждения. Клей Дермабонд (Dermabond) можно использовать в сочетании с глубоким кожным швом, но не вместо него.

Противопоказания:

- не использовать при активной инфекции, гангрене или для лечения пролежневых поражений;
- не использовать на слизистых оболочках или в области кожно-слизистой каймы (например, полость рта или губы) или в зонах, часто подвергающихся воздействию биологических жидкостей или с густым естественным волосяным покровом;
- не использовать у пациентов при наличии сведений о гиперчувствительности к цианакрилату или формальдегиду.

Предупреждения:

Кожный клей Дермабонд (Dermabond) не следует наносить:

- при высоком натяжении краев кожи, пока не будет достигнута иммобилизация в ходе заживления или за счет применения других средств закрытия раны (например, швы, кожные скобки);
- если область раны будет подвергаться увлажнению или трению;
- не допускать попадания в глаза.

Варианты исполнения:

Описание	Код	Кол-во в коробке	Объём, мл	Длина раны, см
DERMABOND ProPen XL	APPXL6	6	0.75	22–25
DERMABOND ProPen	APP6	6	0.5	12–15
DERMABOND	AHV12	12	0.5	10–12
DERMABOND Mini	AHVM12	12	0.36	5–7
DERMABOND Advanced	ANX6 / ANX12	6 / 12		