



## Пластырь Мепиформ для лечения рубцов

ИМ-7.107676

Производитель: Molnlycke Health Care AB

### Технические характеристики:

Исполнение.....пластырь

Тип.....для лечения рубцов

Вид.....нестерильный

Основа.....силикон

Размер.....5×7.5 см / 10×18 см / 4×30 см

### Описание

Силиконовый пластырь Мепиформ (Mepiform) – самоприлипающая повязка с мягким силиконом для лечения рубцов. Работает на свежих и старых гипертрофических и келлоидных рубцах.

Держится на коже не за счет приклеивания (как в обычных пластырях), а за счет присасывающего эффекта силикона. Именно поэтому один и тот же пластырь можно многократно снимать и наносить снова без потери его адгезивных свойств.

Пластырь Мепиформ не является лекарственным средством, поэтому его можно применять, как детям, так и при беременности. В состав Мепиформа входит чистый силикон, без добавления лекарственных веществ.

Срок ношения: от 5-ти до 14-ти дней (первое время 3–5 дней).

Рассасывание рубцов: от 3-х месяцев до 1 года.

Мепиформ необходимо носить постоянно. Можно снимать, если необходимо обработать рубец, а затем накладывать повторно.

Для максимального эффекта применение Mepiform следует начинать сразу после образования рубца.

Размеры: 5×7.5 см / 10×18 см / 4×30 см.

Свойства:

- телесного цвета;
- не требует дополнительной фиксации;
- с фильтром УФ-лучей (кожа под пластырем будет загорать, так же, как и без него, не образуя белесого пятна);
- большой пластырь можно разрезать обычными ножницами;
- водонепроницаемый (тем не менее, пластырь необходимо снимать перед душем, ванной или купанием);
- дышащий.

**ВАЖНО!** Необходимо, чтобы пластырь выступал на 1.5–2 см на здоровую кожу вокруг рубца.

В упаковке: 5 шт.

---

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 [imn.by/become-supplier](https://imn.by/become-supplier)