



Клей медицинский БФ-6

ИМ-7.97335/2106

Классификационный код: 32.50.50.310

Производитель: Лубныфарм ПАО

Технические характеристики:

Объем..... 25 мл

Самопроизвольное отшелушивание..... 2-3 дней

Описание

Клей медицинский БФ-6 оказывает ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как изолирующее средство, способствует заживлению мелких кожных ран вследствие образования на их поверхности изолирующей пленки. Такая пленка эластична и устойчива к механическим и химическим воздействиям.

Назначение:

- Обработка ссадин, царапин, порезов
- Дезинфекция раздражений на коже
- В стоматологии клей используется для покрытия корня зуба, лечения околокорневого зубного очага (гранулем, кист и прочего). При покрытии Клеем БФ-6 корня зуба создаются условия изоляции микрофлоры мелких корневых канальцев от продуктов деструкции тканей.

Применение клея БФ-6:

- Клей БФ-6 применяют местно для взрослых и детей. Детям в возрасте до 1 года применения Клея БФ-6 не рекомендуется.
- Перед нанесением препарата участок кожи тщательно очищают от загрязнений.
- Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и просушивают место, которое подлежит покрытию клеем. Клей наносят на кожу тонким равномерным слоем до полного покрытия участка повреждения и прилегающих неповрежденных тканей. В случае нарушения целостности пленки поверх нее наносят новую пленку.

- При хирургическом лечении околокорневых очагов инфекции корень зуба тщательно очищают от грануляции и оболочки кисты, останавливают кровотечение, просушивают и покрывают клеем часть корня зуба, которая выступает в дефект костной ткани челюсти, не допуская затекания клея на кость. Через 1–2 минуты рану осушают, следя за заполнением околокорневого дефекта челюсти кровью пьяным сгустком. Дальнейшее ведение послеоперационного периода обычное.
- Пленка образуется в течение 2–5 минут после нанесения клея БФ-6 и прочно удерживается на коже в течение 2–3 дней, а на верхушке корня зуба до 7 суток.

Инструкция по применению Клея БФ-6

Противопоказания

Средство практически не имеет противопоказаний.

Исключение – индивидуальная непереносимость человеком какого-либо компонента, входящего в его состав.

Также запрещено его применять детям до 1 года.

Побочные действия: возможны аллергические реакции.

Состав: спиртовой раствор модификации фенолоформальдегидной смолы, поливинилбутиролю и канифоли, пластифицированный пластификатором.

Условия хранения: хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C, вдали от нагревательных устройств и открытого огня.

Срок годности: 4 года