



ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ПОЛИМАГ-02М В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



ПОЛИМАГ-02М

аппарат магнитотерапевтический

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Бронхолёгочные заболевания – актуальная медико-социальная проблема. Они представляют одну из самых больших угроз для здоровья человечества, поскольку ведут к инвалидности и даже преждевременному летальному исходу. При этом лечение и реабилитация больных весьма трудоёмки и связаны с немалыми затратами на первую помощь, госпитализацию и лекарства.



По данным ВОЗ, каждая шестая смерть в мире связана именно с заболеваниями лёгких.

Задача современной медицины – обеспечить благоприятный результат борьбы с бронхолёгочными заболеваниями в короткие сроки с целью более эффективного использования коечного фонда.

Для этого она должна иметь в своём арсенале эффективные, эргономичные, безопасные и комфортные в применении средства, в том числе немедикаментозные.

Так, физиотерапия способна значительно усилить результативность лечения – безопасно и комфортно для пациента и медика.

Существует целый ряд проблем, мешающих благополучному итогу лечения:

- большое и всё возрастающее количество пациентов, нуждающихся в своевременной и качественной медпомощи;
- рост осложненных случаев, требующих усиленного комплексного подхода в лечении;
- нехватка доступных и действенных средств лечения, дефицит медперсонала, работа «в цейтноте»;
- слабая эффективность антибиотикотерапии и ингаляционной терапии при лечении последствий пневмонии.

! ВАЖНО: при тяжёлых лёгочных заболеваниях обязательна комбинированная терапия, которая включает средства, стимулирующие иммунитет.

Предлагаем расширить комплекс медицинских лечебных мероприятий включением в него аппарата магнитотерапии **ПОЛИМАГ-02М**.

ПОЛИМАГ-02М – профессиональный медицинский аппарат нового поколения с высоким лечебным эффектом. Конструктивно очень удобен для применения в условиях российских лечебных учреждений.

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДИКИ МАГНИТОТЕРАПИИ В ОДНОМ КОМПЛЕКСЕ!

Магнитотерапия – перспективное направление реабилитации лёгочных больных.

ПОЛИМАГ-02М генерирует непрерывные и прерывистые импульсные магнитные поля (бегущее, вращающееся, пульсирующее), различающиеся по конфигурации, интенсивности, направлению и скорости перемещения в пространстве.


Показания к применению аппарата ПОЛИМАГ-02М при болезнях органов дыхания:

- J00-J06. Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей.
- J10-J18. При пневмониях.
- J20-J22. Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей.
- J30-J39. Другие болезни верхних дыхательных путей.
- J40-J47. Хронические болезни нижних дыхательных путей.
- J60-J70. Болезни легкого, вызванные внешними агентами.


Показания к применению аппарата ПОЛИМАГ-02М при болезнях органов дыхания:

- J12. Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках.
- J13. Пневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae*.
- J15. Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках.
- J16. Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированными в других рубриках.
- J17*. Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках.
- J18. Пневмония без уточнения возбудителя.
- J18.1. Долевая пневмония не уточненная.
- J18.2. Гипостатическая пневмония не уточненная.
- J18.8. Другая пневмония, возбудитель не уточнен.


ОСНОВНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ

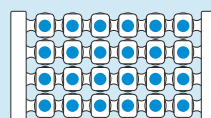


неподвижное поле

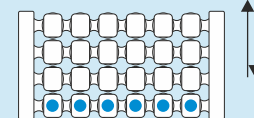

бегущая горизонталь

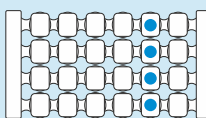

бегущая вертикаль

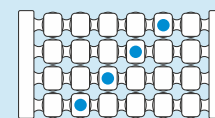

бегущая диагональ

ЛИНЕЙКА ИЗЛУЧАЮЩАЯ ГИБКАЯ



неподвижное поле




бегущая горизонталь

ЛОКАЛЬНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ




неподвижное поле

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

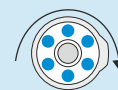


вращающееся поле

ИЗЛУЧАТЕЛЬ «ОГОЛОВЬЕ»

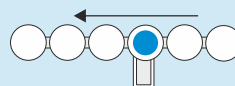

бегущее поле

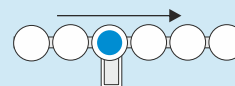

Магнитотерапия повышает эффективность доставки лекарств, а также обладает собственным лечебным действием при легочных заболеваниях.

В соответствии с Приказами Минздрава РФ № 1213н и № 1658н об утверждении стандарта специализированной и первичной медико-санитарной помощи при пневмонии взрослым и детям с целью профилактики, лечения и медицинской реабилитации должна оказываться услуга А17.30.019 (воздействия переменным магнитным полем).

Метод обладает доказанным высоким эффектом применения и абсолютно безопасен при соблюдении правил лечения и противопоказаний.

ПОЛИМАГ-02М – МНОЖЕСТВО ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

При пневмониях аппарат ПОЛИМАГ-02М способствует:

- улучшению циркуляции крови и газообмена в легких;
- замедлению размножения патогенных микроорганизмов;
- усилению детоксикации очага инфекции;
- активизации иммунитета;
- снятию спазма бронхов, уменьшению кашля и улучшению отхождения мокроты;
- уменьшению вязкости выделений и выведению их из легких;
- устранению лёгочного спазма и раздражения воспаленных тканей;
- снижению медикаментозной нагрузки на организм;
- сокращению сроков лечения, ускорению реабилитации пациента;
- улучшению общего состояния больного;
- ускорению восстановления после воспаления;
- окончательному подавлению воспалительного процесса, недопущению хронических проблем с легкими, осложнений, утраты трудоспособности.



Применение в педиатрии разрешено и подробно регламентировано специальным разделом медицинской инструкции

ЦЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА

- Формирует самые востребованные параметры низкочастотного магнитного поля с диапазоном магнитной индукции от 2 до 45 мТл и частотой от 1 до 100 Гц.
- В энергонезависимой памяти аппарата хранится 622 протокола лечения 1 355 нозологических форм, классифицированных по МКБ 10.
- Включается вводом кода заболевания в соответствии с классификацией по МКБ 10, при этом аппарат, на сенсорном дисплее, отобразит схему расположения излучателей, автоматически выставит необходимые параметры терапии.
- Включение и отключение (автоматическое) сопровождаются звуковым сигналом, что позволяет медику не находиться около пациента во время процедуры;
- Позволяет проводить общую магнитотерапию с одновременным использованием всех основных излучателей, обширно воздействуя на микроциркуляторное русло организма и повышая эффективность лечения.
- Возможно также зональное или локальное воздействие – одним, двумя основными или дополнительным излучателем (в зависимости от заболеваний и выбранных методик).
- Излучатели можно применять путем плоскостного обертывания для создания соленоида.

ПОЛИМАГ-02М – стационарный магнитотерапевтический комплекс, практически целый компьютер с мощным лечебным потенциалом.

Аппарат не имеет аналогов с точки зрения конструкции и функциональных возможностей, реализующих все известные методики магнитотерапии.



ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА ПОЛИМАГ-02М

По своим функциональным возможностям ПОЛИМАГ-02М обладает всеми достоинствами современных крупногабаритных установок в лечебном процессе. При этом обладает целым списком неоспоримых преимуществ перед аналогами:

- дает возможность одновременного лечения 2 пациентов с различными заболеваниями, что обеспечивает его высокую пропускную способность;
- может непрерывно работать не менее 8 часов (в циклическом режиме 30 мин. магнитное воздействие, 10 мин. – перерыв);
- благодаря наличию колес без усилий перемещается из одного помещения в другое, что упрощает проведение дезинфекционных мероприятий в кабинете;
- В комплекте имеются:
 - специализированная передвижная стойка для расположения блока управления, основных излучателей и гибких излучающих линеек;
 - удобный столик-тележка для излучателей: офтальмологического, локального и «оголовья»;



- занимает мало места, не требует заземления;
- доступен по стоимости.

КЛИНИЧЕСКИ ИСПЫТАН, ИМЕЕТ ДОКАЗАННУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПОЛИМАГ с 2005 года применяется в физиотерапевтическом отделении ГВКГ им. академика Н. Н. Бурденко.

По решению ученого совета ГВКГ, наработанные уникальные методики аппаратного лечения распространенных нозологий изданы в виде иллюстрированного методического пособия для врачей «Применение аппарата ПОЛИМАГ в физиотерапевтической практике».

Заслуженным врачом РФ Ушаковым А.А. получен бесценный опыт лечения очаговой пневмонии с помощью низкочастотной магнитотерапии аппаратом ПОЛИМАГ-02М.

После проведения курса магнитотерапии у всех больных очаговой пневмонией, по данным рентге-

ноконтроля, наступило полное рассасывание воспалительного инфильтрата.

По данным лабораторных исследований и аускультативной картине наступило полное выздоровление больных, причем на 3-4 дня раньше, чем у больных, которые получали только медикаментозное лечение.


Имеются отзывы о высокой эффективности применения аппарата не только в лечебном процессе городских больниц, но и в санаторно-курортной и восстановительной медицине.



Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко

ПОЛИМАГ-02М – ФЛАГМАН ФИЗИОАППАРАТОВ «ЕЛАМЕД»

Почему стоит включить ПОЛИМАГ-02М в лечебный комплекс?

-  Доказанная клиническая эффективность импульсной низкочастотной магнитотерапии.
-  Прогнозируемый клинический результат терапии.
-  Увеличенное количество предустановленных протоколов лечения (622) и количество нозологий (1355).
-  Широкий выбор излучателей для проведения терапии.
-  Отсутствие возрастных ограничений.
-  Возможность оказывать услуги сразу двум пациентам с разными заболеваниями.
-  Повышенная пропускная способность, разгрузка больниц.
-  Лёгкость освоения аппарата персоналом любого уровня.
-  Медицинская инструкция оформлена в соответствии с МКБ-10 и зарегистрирована Росздравнадзором РФ.

В современных условиях ПОЛИМАГ-02М может стать надёжным подспорьем в лечении пациентов с лёгочными заболеваниями и сократить сроки нахождения пациентов на стационарном лечении.



Компания ЕЛАМЕД предлагает вам оптимальные условия покупки, доставки и установки медицинской техники и готова взять на себя все сопутствующие хлопоты. Спасибо за ваш бесценный вклад в здоровье людей!