

Перед применением изделий, одежды и комплектов медицинских одноразовых необходимо внимательно ознакомиться с требованиями настоящей инструкции по применению, которая содержит основные сведения о материалах, технических характеристиках и правилах применения.

Противопоказания

При использовании изделий согласно данной инструкции по применению противопоказаний не существует.

Предупреждения

- Не используйте изделия по истечении срока хранения, указанного на упаковке.

- Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение не менее 12 ч.








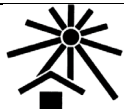
- Перед применением стерильных изделий необходимо убедиться в целостности упаковки. При выявлении ее нарушения, изделия считаются нестерильными и могут использоваться только как нестерильные изделия.

- Изделия одноразового применения. Не подлежат дезинфекции для повторного применения.

Расшифровка символов маркировки

Расшифровка символов, используемых на маркировке, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Символ	Расшифровка
	Производитель
	Номер партии (серии)
	Дата изготовления (стерилизации)
	Использовать до
	Метод стерилизации с использованием окиси этилена
	Метод стерилизации с использованием радиации
	Не использовать повторно
	Беречь от солнечных лучей

**Беречь от влаги****Основные положения**

Изделия, одежда и комплекты медицинские одноразовые представляют собой изделия медицинского назначения одноразового применения стерильные и не стерильные, изготовленные из нетканых материалов и предназначенные для использования их медицинскими работниками и пациентами в качестве одноразовых средств, обеспечивающих биобезопасность медицинской помощи.

Основной ассортимент:

- изделия: держатели, карманы, мешки, простыни, пелерины, пеленки, подстилки, салфетки, наматрасники, наволочки, пододеяльники и т.д.
- одежда: халаты, шапочки, костюмы хирургические (куртка и брюки), комбинезоны защитные, бахилы, фартуки, нарукавники и т.д.
- комплекты: комплекты постельного белья, комплекты одежды для хирургов, комплекты белья хирургические, комплекты ангиографические, комплекты кардиоваскулярные, комплекты для операций и т.д.

Весь ассортимент изделий изготовлен из нетканых материалов и обладает хорошей драпируемостью (способность собираться в складки), мягкостью при касании и обеспечивает приятный контакт с телом.

Область применения

Изделия, одежда и комплекты медицинские одноразовые используются в организациях здравоохранения различного профиля.

Изделия, одежда и комплекты медицинские одноразовые в обязательном порядке применяются:

- при выполнении работ в операционных для трансплантации органов и тканей;
- при проведении высокотехнологичных и сложных хирургических и микрохирургических операций;
 - в родильных залах перинатальных центров;
 - в асептических палатах;
 - в лабораториях;
 - в стоматологиях;
 - в поликлиниках.

Материалы, используемые для изготовления изделий, одежды и комплектов медицинских одноразовых

При изготовлении изделий, одежды и комплектов медицинских одноразовых используются следующие материалы:

- нетканый материал, ламинированный, неламинированный полиэтиленом, окрашенный и неокрашенный, плотностью 11-80 г/м² типов: «Спанлейс» (Ф, ФП и ФЛ), «Спанбонд» (СБ и СБЛ);

- нетканый влагоотталкивающий, воздухопроницаемый нетканый материал «Вуденпалп» (ВП), плотностью 68 г/кв.м, состоящий из смеси волокон: 55% - целлюлозы и 45% - полиэстера;
- нетканый фильтрующий материал, плотностью 11 – 80 г/м²;
- многослойные нетканые материалы СММС (слои: спанбонд-мелтблаун-мелтблаун-спанбонд) плотностью от 15 до 60 г/ м²;
- нетканое полипропиленовое полотно СС или СМС, плотностью 17 - 100 г/м²;
- комбинированный многослойный нетканый материал Медикейс (М2 и М3) плотностью 80 г/м² или аналог «Сантейс», «Брэтек» плотностью 32-104 г/м²;
- марля медицинская хлопчатобумажная и смешанная с вложением вискозного волокна;
- пленка полиэтиленовая толщиной 0,01-0,1 мм.

Указания по применению

Изделия, одежду и комплекты медицинские одноразовые стерильные используются при проведении хирургических операций, при обработке ран, оказании неотложной помощи, проведении реанимационных мероприятий.

В зависимости от вида хирургического вмешательства рекомендуется использовать стерильные специализированные комплекты для конкретных операций, включающие набор специализированных простыней с вырезами и отверстиями, снабженных адгезивными краями, впитывающими зонами, карманами и т.д.

Для медицинского персонала, участвующего в проведении хирургических операций, рекомендуется использовать стерильные хирургические халаты одноразового применения с влагонепроницаемым передом и рукавами.

В акушерских и гинекологических отделениях (родильных блоках и других помещениях с асептическим режимом для новорожденных) рекомендуется использовать одежду медицинскую одноразовую стерильную, а также следующие комплекты медицинские одноразовые стерильные:

- для приема родов;
- для новорожденного;
- для кесарева сечения;
- для лапароскопии и гинекологических операций.

В травматологических и ортопедических отделениях рекомендуется использовать халаты, костюмы, фартуки, нарукавники, шапочки, маски, простыни, пеленки, салфетки, а также комплекты для хирургических операций.

В отделениях анестезиологии и реанимации рекомендуется использовать халаты, халаты с непромокаемым передом, фартуки, нарукавники, шапочки, простыни, впитывающие пеленки. При выполнении медицинских вмешательств в условиях реанимационного зала рекомендуется использовать изделия, одежду и комплекты медицинские стерильные.

В офтальмологических (хирургических) отделениях рекомендуется использовать комплекты одноразовые медицинской стерильные для

офтальмологических операций, стерильные простыни с отверстиями различных конфигураций с липкими краями и карманами для сбора жидкости, чехлы на инструментальный стол, салфетки хирургические. При выполнении офтальмологических хирургических вмешательств используются одноразовые стерильные халаты, шапочки, бахилы, фартуки, нарукавники.

В отоларингологических (хирургических) отделениях рекомендуется использовать одноразовую медицинскую одежду и белье, а также комплекты стерильной одноразовой медицинской одежды и белья для хирургических операций, простыни с отверстиями различных конфигураций с липкими краями и карманами для сбора жидкости, чехлы на инструментальный стол, салфетки.

В онкологических и онкогематологических отделениях рекомендуется использовать халаты, костюмы, шапочки, бахилы, маски, фартуки, нарукавники, простыни, пеленки, а также комплекты для хирургических операций.

Пациентов, получающих лучевую терапию и химиотерапию, рекомендуется обеспечивать стерильными простынями, пеленками, наволочками, а также комплектами.

В стоматологических амбулаторно-поликлинических организациях рекомендуется использовать халаты, костюмы, шапочки, бахилы, маски, простыни, салфетки, а также комплекты для хирургических операций.

***ВНИМАНИЕ:** Изделия, одежда и комплекты медицинские одноразового применения. Не подлежат дезинфекции для повторного применения.*

Вскройте упаковку (соблюдая правила асептики для стерильных изделий) и извлеките изделие.

Используйте по назначению:

Халат, костюм: наденьте поверх одежды либо без нее, расправьте, закрепите завязки.

Нарукавник: наденьте на руку поверх одежды либо без неё, расправьте нарукавник и удобно разместите фиксирующие резинки (эластичную тесьму) у локтевого сустава, на запястье нарукавник крепится с помощью резинки или манжеты.

Шапочка шарлотта: раскройте (гофрированную полосу) пальцами, наденьте на голову, зафиксируйте с помощью резинки, так чтобы шапочка полностью закрывала волосы, расправьте для удобства.

Шапочка колпак: расправьте, наденьте на голову, зафиксируйте на затылке с помощью завязок.

Бахилы: наденьте поверх обуви, начиная с носка, расправьте по всей ширине стопы, закрепите на пяточной части либо на голени, в зависимости от высоты, с помощью резинок (завязок).

Простыни и пеленки операционные предназначены для накрывания операционного стола, кушеток, инструментальных столов, и пациента при проведении хирургических операций, используются в качестве подстилочного материала.

Салфетки впитывающие используются в качестве полотенец, протирачного, перевязочного, подстилочного материала.

Хранение и гарантии изготовителя

Хранение изделий, одежды и комплектов медицинских одноразовых в организациях здравоохранения должно осуществляться в специально выделенных бельевых помещениях для чистого белья при температуре окружающей среды от +5 °С до +40 °С и влажности не более 80%.

Стерильные изделия, одежда и комплекты медицинские одноразовые должны храниться отдельно от нестерильных (на специально выделенных полках или в специальных шкафах).

При выявлении нарушения целостности упаковки, в которой находились стерильные изделия считаются нестерильными и могут использоваться только как нестерильные изделия.

Срок годности изделий, одежды и комплектов медицинских одноразовых стерильных – 3 года с даты стерилизации, при условии соблюдения требований к условиям хранения.

Срок хранения изделий, одежды и комплектов медицинских одноразовых нестерильных – 5 лет с даты изготовления, при условии соблюдения требований к условиям хранения.

***ВНИМАНИЕ:** Не использовать изделия по истечении срока хранения, указанного на упаковке.*

Утилизация

Утилизация изделий, одежды и комплектов медицинских одноразовых должна производиться согласно требованиям санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением МЗ РБ от 07.02.2018 г. № 14.

Использованные изделия, одежда и комплекты медицинские одноразовые не имеющие контакта и не загрязненные биологическими жидкостями утилизируют как неопасные (коммунальные) медицинские отходы, загрязненные - как опасные медицинские отходы.



ООО «Медарсан», Республика Беларусь,
220070, г. Минск, ул. Радиальная, д.36, ком.171
тел/факс: + 375 17 296-53-46, +375 17 299-08-79