


Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150  
Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не выше +2°C при относительной влажности от 45 до 70%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Свидетельство о приемке

Изделие и его составные части соответствуют требованиям ТУ ВУ 190666709.009-2019 (ГОСТ 16371-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки


Бригада

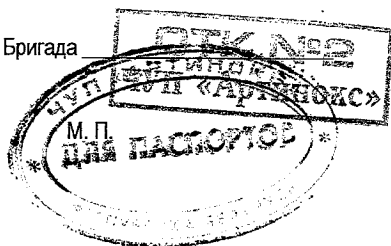

# ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)**

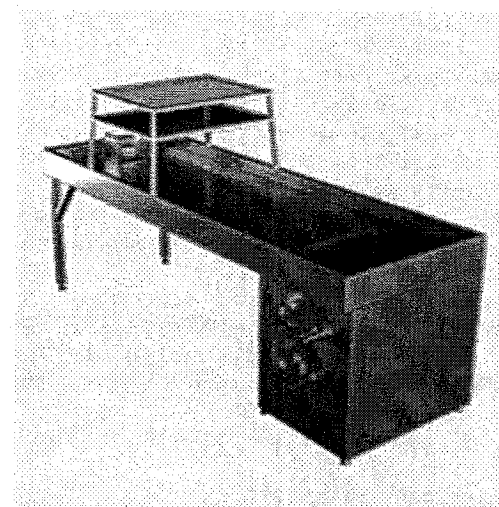

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

**Стол патологоанатомический  
серии АТ  
ГОСТ 16371-2014**

**Стол патологоанатомический  
АТ-В81**

**1. Назначение**

Стол предназначен для эксплуатации в патологоанатомических учреждениях

**2. Общая характеристика**

Стол конструкционно выполнен из следующих элементов (полностью изготовлены из нержавеющей стали):

- каркас стола;
- рабочая поверхность.
- раковина
- подголовник
- препараточный столик
- 2 электророзетки

Изделие поставляется в собранном виде.  
Срок эксплуатации изделия – 2 года.

**3. Описание**

Рабочая поверхность ограничена высоким бортиком, и без шва переходит в раковину. Верх стола оборудован звукоизолирующей и имеет уклон по диагонали по направлению к сливу. Слив с рабочей поверхности и раковины соединяются в одну трубу. Ножки стола изготовлены из профилей, выполненных из нержавеющей стали и имеют винты для регулировки горизонтального положения.

Каркас: жесткая, цельносварная конструкция из профильной нержавеющей трубы марки AISI – 304. Опоры каркаса обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0÷20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Рабочая поверхность: жесткая цельносварная конструкция из листового нержавеющей металла марки AISI – 304, сплошная, с герметичным ограждением. Рабочая поверхность стола имеет уклон к месту слива, к которому также присоединяется сливной шланг.

Использование нержавеющей металлопроката позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации. Наружные поверхности стола устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

**4. Упаковка, транспортировка и хранение**

Изделие обернуто стрейч-пленкой либо бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, и/или упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

**5. Правила ухода**

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

**6. Порядок предъявления претензий**

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**7. Технические характеристики**

Артикул	Габаритные размеры	Примечание
АТ-В81	2600*850*850	

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в размеры изделия (по согласованию с заказчиком), при условии, что данные изменения не влияют на основные потребительские свойства, эргономичность и качество.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
2. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
3. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015