

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МАСОК МЕДИЦИНСКИХ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:
ТИП I, ТИП II, ТИП III –стерильная и нестерильная,
ТУ ВУ 690821649.006-2020**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маски медицинские однократного применения из нетканых материалов трехслойные с носовым фиксатором, предназначены для ограничения передачи инфекционных агентов от персонала пациентам во время хирургических операций и в других медицинских помещениях с аналогичными требованиями, в медицинских помещениях общего профиля. Медицинская маска с соответствующим микробным барьером также может эффективно способствовать сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.

Маски выпускаются и подразделяются на следующие типы:

Тип I – маски, предназначены для пациентов и посетителей медицинских и лечебно-профилактических учреждений, персонала иных учреждений, организаций, предприятий, служб и иных лиц (граждан) в профессиональной и обычной жизнедеятельности (не для использования медицинским персоналом), в целях индивидуальной защиты органов дыхания и снижения риска распространения инфекции, в том числе от воздействия окружающих негативных факторов: пыль, грязь, брызги, вирусы, бактерии, инфекции.

Маска применяется для защиты в различных отраслях и сферах: медицина, пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология и др;

Тип II – маски, предназначены для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля;

Тип III – стерильная и нестерильная – маски, предназначены для использования медицинским персоналом в операционных и в медицинских помещениях с высокой вирусной нагрузкой.

Маски устойчивы к незначительным поверхностным механическим воздействиям, брызгам и влаги.

ВНИМАНИЕ! Только для однократного применения с максимальным временем ношения – 2 часа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вскрыть упаковку, вынуть маску из упаковки, расположить маску вертикально перед лицом, завести за уши петли из эластичной тесьмы (резинки) и расправить маску таким образом, чтобы ноздри и рот оказались прикрыты маской, слегка придавить пальцами носовой фиксатор, закрепив тем самым маску на переносице.

Использовать по назначению однократно и не более двух часов.

Заменять маску следует по истечению максимального времени ношения и по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы, а также если маска стала мокрой, дыхание затрудненным. После применения маску утилизировать.

Обратить внимание, имеется ли указание о стерильности «СТЕРИЛЬНО» на упаковке. Если нет, то изделие является нестерильным.

ВНИМАНИЕ! Стерильность гарантирована, если индивидуальная упаковка не открыта или не имеет повреждений.

Маски типа IIR могут быть стерильными и нестерильными.

ОПИСАНИЕ

Маска изготавливается из трех слоев нетканого материала. Средний фильтрующий слой – нетканый материал Мельблаун. Внутренний и внешний слой - нетканый материал. Поверхностная плотность всех слоев не менее 50 г/м². Маска имеет носовой зажим (фиксатор) и ушные петли. Материал маски является гипоаллергенным, водонепроницаемым, устойчив к пылеобразованию, ворсоотделению, обладает свойствами пылезащиты, при этом хорошо пропускает воздух, защищает от вирусов и бактерий, минимизирует риск инфекционных заболеваний в соответствии с эффективностью бактериальной фильтрации масок:

- тип I – не менее 95 %;
- тип II – не менее 98 %;
- тип IIR – не менее 98 %.

Бионагрузка масок не более 30 КОЕ/г.

Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) масок типов I и II - менее 29,4 Па/см², типа IIR – менее 49,0 Па/см²

Брызгоустойчивость маски типа IIR – 16,0 кПа

Прочность крепления средств фиксации масок – не менее 5Н

Маски проверены на биосовместимость по ЕН ИСО 10993

Цвет изделия может быть разнообразным и согласовывается при заказе.

Геометрические размеры изделия – высота 10см±3, длина 18см±3

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение масок осуществляют в вентилируемых крытых сухих складских помещениях вдали от солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов при температуре воздуха от 0 °С и не выше плюс 30 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Использовать изделие после транспортирования при минусовых температур следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения.

Хранить в сухом и недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не использовать при нарушении целостности изделий или индивидуальной упаковки.

УПАКОВКА

Стерильное изделие упаковано в индивидуальную упаковку с надписью «СТЕРИЛЬНО».

Индивидуальная упаковка на нестерильные изделия может содержать от одной и более единиц, в зависимости от заявки потребителя.

Групповая упаковка содержит от двух и более индивидуальных упаковок, в зависимости от заявки потребителя.

Транспортная упаковка содержит все вышеперечисленные виды упаковок.

Все виды упаковок, в том числе транспортная, имеют маркировку в соответствии с ТУ ВУ 690821649.005-2020

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения (годности) масок, в том числе срок стерильности – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Просроченные и использованные маски, утилизируются в соответствии с инструкциями медицинских учреждений, как безопасные отходы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Медикон»
222322, ул. Заславская, д. 2, городской поселок Радошковичи, Молодечненский район, Минская область, тел/ф +375 176 555030, 555080
Электронный адрес: bel-medikon@yandex.ru