

**Маска медицинская
одноразовая серии ММО
Инструкция по эксплуатации
ЛЯШБ.305262.002 ИС1**

Перв. примен.

ЛЯШБ.305262.002

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мисник		22.05.20
Пров.		Мисник		22.05.20
Н.отд.		Никаноров		25.05.20
Н.контр.		Семенькова		25.05.20
Утв.		Никаноров		25.05.20

ЛЯШБ.305262.002 ИС1

Маска медицинская
одноразовая серии ММО
Инструкция
по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
	1	5

1 Область применения

Маска медицинская одноразовая серии ММО (далее – маска) предназначена для ограничения передачи инфекционных агентов от персонала пациентам в медицинских помещениях общего профиля, а также может эффективно способствовать сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.

Маска рассчитана для использования в медицинских помещениях общего профиля для полной защиты рабочей среды от капельного загрязнения выделениями из носовой полости и горла во время проведения медицинских процедур.

Маска предназначена для однократного (одноразового) использования в течение одной смены (не более 8 часов, в зависимости от условий эксплуатации).

Маска предназначена для применения при температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 30° С, относительной влажности до 80% при температуре плюс 25° С, атмосферным давлением от 84 до 107 кПа.

Марки масок, типы масок по уровню защиты и их назначение приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Марки масок, типы масок по уровню защиты и их назначение.

Марка маски	Тип маски по ГОСТ Р 58396	Назначение
ММО-I	I	Для использования пациентами медицинских учреждений в случаях повышенной эпидемиологической опасности при эпидемиях и пандемиях.
ММО-II	II	Для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ЛЯШБ.305262.002 ИС1				Лист
				2

2 Ограничения по применению

Запрещается применять маску:

- имеющую сквозные отверстия и нарушения целостности фильтрующей полумаски;

- более одного раза (маска одноразовая) или более 8 часов.

3 Правила, условия и сроки хранения

Маска до использования должна храниться в упаковке изготовителя в сухих отапливаемых и вентилируемых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации, плесневых и дереворазрушающих грибов при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40° С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25° С.

Гарантийный срок хранения маски 4 года с даты изготовления.

Дату изготовления смотрите на упаковке.

4 Транспортирование

Транспортирование маски осуществляется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта, в защищенном виде от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40° С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25° С.

5 Обращение с отходами

С отработанной маской, использованной медицинским персоналом, должны обращаться как с медицинскими отходами согласно требованиям, изложенных в санитарных нормах и правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14 и в специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020г. № 130.

В других случаях с отработанной маской должны обращаться как с бытовыми отходами.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛЯШБ.305262.002 ИС1	Лист
						3

6 Правила пользования

6.1 Маску используют однократно.

6.2 Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась.

6.3 Носовой фиксатор следует плотно подогнать по спинке носа для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.

6.4 При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к маске необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожными антисептиками).

6.5 Менять маски необходимо не реже чем через 8 часов. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.

6.6 Снимать маску следует за ушные петли, не прикасаясь к фильтрующей поверхности.

Внимание! Правильное использование маски сохранит Ваше здоровье.

Изготовитель – ОАО «Техника связи»
Республика Беларусь, 211011, Витебская область, г. Барань, ул. Набережная, 1
тел.: +375 (216) 55 72 95
e-mail: contact@t-c.by

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛЯШБ.305262.002 ИС1

Лист

4