



## Инструкция по применению бахил медицинских одноразовых нестерильных полимерных с одинарной резинкой

### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция определяет предназначение **бахил медицинских одноразовых нестерильных полимерных с одинарной резинкой** (в дальнейшем - бахилы), устанавливает порядок их использования и утилизации.

### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Бахилы являются элементом средств индивидуальной защиты (СИЗ). Бахилы защищают от распространения загрязнений, находящихся на обуви, которые могут содержать различные микроорганизмы, включая вирусы и бактерии.

### 3. СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

3.1. Состав: полимерный материал (полиэтилен низкого или высокого давления, или полипропилен) различных цветов, стягивающая резинка;

3.2. Упаковка: групповая по 100шт. или №2в инд. упаковке

### 4. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ С ОДИНАРНОЙ РЕЗИНКОЙ

4.1. Бахилы предназначены для исключения переноса бытовой грязи с обувью внутрь помещений и предупреждения распространения возбудителей инфекционных болезней, переносимых посредством обуви. Бахилы предназначены для предохранения обуви от влаги и загрязнений и могут применяться в медицине, косметологии, в химической, фармацевтической, пищевой промышленности, при лабораторных работах, в быту, в спортивных и оздоровительных комплексах.

4.2. Бахилы предназначены для использования в температурном диапазоне от +2С° до +50С°;

4.3. Бахилы не предназначены для защиты от промышленных и сильных загрязнений, и не заменяют обувь.

### 5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ С ОДИНАРНОЙ РЕЗИНКОЙ

5.1. Возьмите пару бахил, растяните эластичную резинку и аккуратно оденьте бахилы на обувь так, чтобы они полностью равномерно закрывали обувь;

5.2. При ходьбе в бахилах требуется соблюдать осторожность в связи с повышенным скольжением ног по поверхности пола и риском падения при эксплуатации бахил и учитывать, что материал не заменяет и не обладает прочностью обуви;

5.3. Повторное надевание бахил не допустимо, необходимо надевать новые бахилы;

5.4. Не оставляйте снятые использованные бахилы в открытом виде. Использованные бахилы после снятия поместите в емкость для отходов и обязательно помойте руки водой с мылом или обработайте руки антисептиком.

### 6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ С ОДИНАРНОЙ РЕЗИНКОЙ

6.1. Индивидуальная непереносимость материалов.

### 7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БАХИЛ МЕДИЦИНСКИХ ОДНОРАЗОВЫХ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ С ОДИНАРНОЙ РЕЗИНКОЙ

7.1. Бахилы должны храниться в помещениях для одноразовой одежды и/или белья;

7.2. Срок хранения — 5 лет;

7.3. Использованные бахилы из полимерного материала - пригодны для вторичной переработки для промышленно-технических целей.

### 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

8.1. ООО «ФАРМА-МАРКЕТ», Республика Беларусь, 220071, г. Минск, ул. Платонова, 28-30а  
тел/факс: (+375-17) 270-61-70; 270-61-71; 270-61-72, e.mail: [farma.market2015@yandex.ru](mailto:farma.market2015@yandex.ru)



Директор ООО «ФАРМА-МАРКЕТ»  
Литвинов Сергей Васильевич