

УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству ООО «Киевгума»



Буткевич А.С.

202 2019 г

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения.

Кружка Эсмарха резиновая № 1, № 2, № 3.

Состав и описание изделия.

Кружка Эсмарха представляет собой резиновый баллон вместимостью: № 1 - (0,8±0,10) литра, № 2 (1,5±0,15) литра и № 3 - (2,5±0,25) литра со штуцером, трубкой, наконечниками, наконечником маточным, зажимом или поворотным краном. Кружка предназначена для санитарно-гигиенических целей (спринцевания и промывания) при индивидуальном применении или в лечебных учреждениях.

Наименование и (или) товарный знак организации-производителя.

ООО "Киевгума" (УКРАИНА).

Область применения.

В медицинских учреждениях и в быту

Комплектность.

- трубка,
- наконечники,
- наконечник маточный,
- зажим.


Способ применения.

Протереть снаружи кружку марлевым тампоном, смоченным в 3% по массе растворе перекиси водорода дважды с интервалом в 15 минут. Перед применением и после эксплуатации кружку и ее составные части промыть горячей (не выше 90°C) водой, затем промыть проточной или кипяченой водой. Высушить при комнатной температуре. Наконечник перед применением и после эксплуатации промыть теплой водой с мылом (при индивидуальном использовании), или обработать в течение 60 минут в 6% по массе растворе перекиси водорода (в случае использования в лечебных учреждениях), затем промыть проточной и кипяченой водой.

Если кружка в разобранном виде, следует на свободный конец штуцера одеть трубку.

Трубку провести через оба отверстия зажима (положение «открыто» - см. рис.). В другой конец трубки вставить наконечник (при промывании) или маточный наконечник (при спринцевании). Собранный в систему кружку подвесить за петлю.

Перевести зажим в положение «закрыто»; нажав пальцем на фиксатор зажима с максимальным усилием до щелчка (см. рис.). В горловину кружки залить требуемое количество лекарственного раствора. Во время проведения процедуры перевести зажим в положение «открыто», нажав пальцем на зубчатую часть фиксатора, что обеспечит свободное истечение жидкости из кружки. По окончании санитарно-гигиенической процедуры зажим перевести в положение «закрыто».

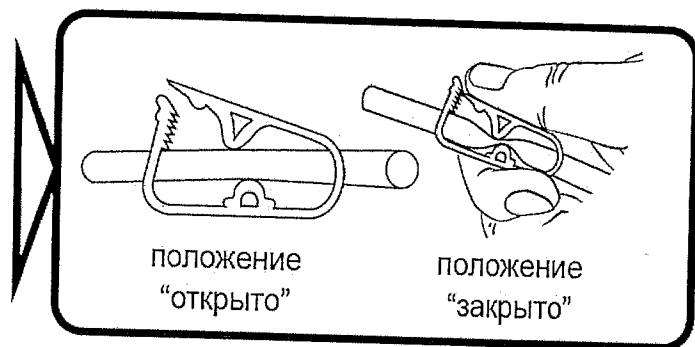

Условия хранения.

Хранить кружку следует в помещении при температуре от 5°C до плюс 25°C на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. После транспортирования при отрицательных температурах, кружки выдерживать в упаковке в течение суток в нормальных климатических условиях. Не допускать воздействия на кружку кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих изделие.

Срок годности.

Изготовитель гарантирует качество кружки при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения кружки – 3 года с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Организация-производитель. Завод-изготовитель ООО «Киевгума»

Юридический адрес. Украина, 07400, Киевская область, г. Бровары, ул. Кутузова, 127

e-mail: zbut@kievguma.ua, www.kievguma.ua

+38(044)364-56-72; +38(044)364-56-74

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу импортеров/уполномоченных представителей:

Изготовлены по ТУ У 25.1-00152253-039-2004