

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТР ВИРУСО-БАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Номера по каталогу: 140101, 140201

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фильтры бактериально-вирусные обычно прикрепляются к анестезиологическому или вентиляционному устройству перед установкой контура. После фильтра устанавливается контур. Вредные частицы улавливаются с долей 99,9% благодаря свойству фильтрации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Только для одноразового использования.

Перед использованием внимательно осмотрите устройство, чтобы убедиться, что его содержимое или стерильная упаковка не повреждены во время транспортировки. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** при повреждении.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Фильтры следует заменять по мере загрязнения в противном случае их следует менять каждые 24 часа. Убедитесь в правильности подключения фильтров и отсутствии утечки воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Определите место вдоха или выдоха на устройстве, к которому будет присоединен бактериально-вирусный фильтр.
2. Прикрепите соответствующим образом бактериально-вирусный фильтр к определенному вами входу устройства.
3. Убедитесь, что бактериально-вирусный фильтр правильно прикреплен к устройству.
4. После прикрепления бактериально-вирусного фильтра к устройству поместите дыхательный или анестезиологический контур на другой конец фильтра.
5. После а 24-часового использования замените бактериально-вирусный фильтр на новый.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Продукт предназначен для одноразового использования и используется во время применения. Его следует менять максимум каждые 24 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Использованные продукты должны быть утилизированы в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.

Более подробное описание продукции см. в каталоге.