

КАЛОПРИЕМНИКИ
Инструкция по применению

Дата введения с «__»_____2020г.

2020г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Введение

Калоприемники это одно- или двухкомпонентные системы, состоящие из клеевой пластины, клеящейся к коже живота пациента и мешка-резервуара. Калоприемники предназначены для сбора из искусственного ануса (стомы) кишечного содержимого и устранения его агрессивного воздействия на кожу стомированных больных.

По согласованию с заказчиков калоприемники могут быть подвергнуты стерилизации методом газовой или радиационной обработки.

Описание изделия

Марка	Описание
МОН	Мешок однокомпонентный недренируемый – состоит из недренируемого мешка со встроенной клеевой пластиной.
МОД	Мешок однокомпонентный дренируемый – состоит из дренируемого мешка со встроенной клеевой пластиной. Комплектуется зажимом.
Двухкомпонентная система состоит из отдельной клеевой пластины КП и мешка-резервуара МД/МН	
МН	Мешок – резервуар сменный недренируемый – состоит из сменного недренируемого мешка.
МД	Мешок – резервуар сменный дренируемый – состоит из сменного дренируемого мешка и комплектуется зажимом.
КП	Клеевая пластина представляет собой фланец, снабженный защитным покрытием с отверстием под стому, герметично прикрепленным к нему полимерным основанием с креплением для сменного мешка. Требуемый размер отверстия для стомы вырезается потребителем перед непосредственным использованием.

Внимание! Клеевая пластина КП и мешок-резервуар сменный МД/МН поставляются отдельно.

После транспортировки при отрицательных температурах калоприемники должны быть выдержаны в упакованной таре не менее 1 суток при плюсовой температуре. Непосредственно перед применением выдержать калоприемник при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Крепление калоприемников

1. Подготовка кожи

1.1 Перед применением калоприемников необходимо тщательно вымыть руки. Кожу вокруг стомы вымыть теплой водой с нейтральным мылом, очистив ее от волос и остатков клея от предыдущего калоприемника. Протрите насухо кожу мягкой тканью.

1.2 Не используйте для очистки спиртосодержащие растворы и любые растворы, которые могут повредить приклеиванию калоприемника.

1.3 Кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, без кремов, мазей и пр.

Не допустимо наклеивание пластины на влажную кожу.

2. Подготовка изделия

2.1 Используя специальный шаблон со стандартными отверстиями, выберите размер отверстия, соответствующий размерам и форме Вашей стомы. Размер отверстия должен быть на 2-4 мм больше размера стомы.

2.2 Перед приклеиванием клеевой пластины в течение нескольких минут прогрейте пластину, не снимая с нее защитной бумаги, на каком-либо закрытом источнике тепла (температура которого не превышает 30-40°C) или на своем теле между ладонями, подмышкой и т.п.

2.3 У лежачих пациентов нижний конец калоприемника должен быть направлен к спине.

Важно! Не кладите пластину липкой стороной на какие-либо поверхности и без необходимости не касайтесь липкого слоя руками.

МОН, МОД:

- вырежьте в клеевом слое отверстие, соответствующее форме и диаметру стомы (максимальный диаметр указан на маркировочной этикетке), следя за тем, чтобы не прорезать калоприемник насквозь; Размер отверстия должен быть на 2-4 мм больше размера стомы.
- снимите защитную бумагу от клея;
- приклейте мешок к коже, прижимая и разглаживая клеевой слой снизу-вверх, следя за тем чтобы не образовывались складки.
- для надежной фиксации клеевого слоя, после наклеивания калоприемника, необходимо не менее 2-3 минут находится в спокойном положении при этом прижимая клеевой слой к коже живота.
- при использовании МОД, до наложения мешка закройте его открытый конец, герметично, с помощью зажима

При использовании двухкомпонентной системы, в комплект которой входит МД/МН и КП необходимо:

- подобрать размер отверстия, используя специальный шаблон со стандартными отверстиями Вашей стомы. Размер отверстия должен быть на 2-4 мм больше размера стомы. Соответствующий размер и форму вырезать в клеевой пластине КП
- снять защитную бумагу с клеевой поверхности;
- наложить клеевую пластину КП, прижимая и разглаживая клеевой слой снизу-вверх, следя за тем чтобы не образовывались складки.
- осторожно надавливая, соединить мешок-резервуар МД/МН с клеевой пластиной КП. **Фиксация соединения сопровождается характерным щелчком.**

Важно! Чтобы убедиться, что мешок-резервуар надежно соединен с пластиной, аккуратно потяните мешок вниз.

МД:

- до наложения мешка закройте его открытый конец, герметично, с помощью зажима;

При наличии крепления для пояса, следите за тем, чтобы отверстия для дополнительного крепления поясом были расположены горизонтально.

Помните, что клеевой слой наклеивается на кожу только один раз, его повторное использование не допускается.

Дренаж МОД и МД

Следует регулярно дренировать мешки и не допускать их переполнения. При заполнении 1/3 объема мешка каловыми массами его следует опорожнить.

Калоприемники МОД следует дренировать, не отклеивая от кожи.

Калоприемники двухкомпонентной системы следует дренировать, не снимая со стомы.

Чтобы выпустить скопившиеся газы, используйте верхнее ушко на фланцевом замке мешка. Слегка отсоедините мешок от пластин, выпустите газы и снова плотно соедините мешок с пластиной.

Пластина может оставаться на коже в течение нескольких дней. Если пластина плотно прилегает к коже и обеспечивает полную герметичность, то при дренаже или смене мешков при необходимости, менять ее не следует. Закрепленную пластину можно очистить от каловых масс с помощью мягкой тканевой салфетки и теплой воды. Затем осторожно вытереть насухо. Вы можете кратковременно принимать душ, не снимая калоприемник.

Дренировать мешок следует так: открыть дренажное отверстие, направляя его в унитаз, опорожнить его. Дренажный конец мешка следует тщательно промыть и протереть, герметично закрыть дренажное отверстие зажимом.

Внимание! Следует избегать частой, не оправданной необходимостью смены клеевой пластины КП, т. к. в первые дни липкость пластины самая большая, и процедура снятия пластины может быть болезненной. Кроме того, при этом возможно раздражение кожи!

Срок использования клеевой пластиной корректируется в зависимости от вида стом, состоянии кожи, своевременности опорожнения мешка и применение дополнительных герметизирующих средств.

Удаление калоприемника и его утилизация

Аккуратно отсоедините калоприемник, содержимое мешка слейте в унитаз, положите мешок в полиэтиленовый пакет и завяжите его, после этого выбросьте в мусорное ведро.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Хранение

Хранить при температуре воздуха от минус 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 75% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Защищать от прямых солнечных лучей.

Не храните калоприемники в холодильнике.

Внимание:

Не наклеивайте пластину на влажную кожу, а также на кожу, обработанную мазью, кремом или порошком.

Во избежание отрыва калоприемника не следует допускать его переполнения.

Не допускайте скопления большого количества газов и сильного раздувания емкости, это приводит к нарушению герметичности.

Для предупреждения травмирования кожи не следует снимать калоприемник рывком или с использованием механических средств или химических растворителей.

Вовремя меняйте мешки, не допуская попадания кишечного содержимого под клеевую основу это приводит к раздражению.

При возникновении чувства жжения под клеевой основой снимите калоприемник и обратитесь к врачу.

Не рекомендуется использовать калоприемник при индивидуальной непереносимости компонентов.

Рекомендации РУП «Научно-практический центр гигиены»

Перед применением обязательно сделайте тест на реакцию вашей кожи. Для этого фрагменты изделия размером 1,0*1,0см зафиксируйте на участок неповрежденной кожи внутренней поверхности предплечья или плеча (допускается выполнять аппликации на участках кожи в области спины и живота) на 24 ч, если в течение 48 часов с вашей кожей ничего не произошло, то можете использовать мешки колостомные и илеостомные, следуя инструкции по применению.