



TRO-ASPISET YANKAUER

(RUS)

НАБОР ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТСАСЫВАНИЯ "ЯНКУВЕРА"

ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ

- Поливинилхлорида (ПВХ) и стирол-бутадиеновый сополимера.

ПОКАЗАНИЯ:

Набор для хирургического отсасывания TRO-ASPISET YANKAUER используется для очистки кровяных секретов или простого удаления секрета во время открытой операции или для очистки урофрингеальных секретов, таких как слюна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Используя аспирационную технику, закрепите маленький переходник трубки на ручке и большой переходник на всасывающем насосе.
- Смажьте кончик трубки Yankauer водорастворимой смазкой.
- Вставьте наконечник ручки в часть тела и дайте ему убрать секретацию путем всасывания.
- Контролируйте степень всасывания, накладывая большой палец на отверстие, находящееся на задней стороне проксимальной части рукоятки Yankauer.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не использовать, если индивидуальная упаковка открыта или повреждена.
- Продукт должен использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.
- Повторная стерилизация исключается. После однократного использования утилизируется.
- Нельзя использовать для лечения детей и беременных или кормящих женщин.
- Повторное использование и очистка изделия может привести к изменению его структурных и механических свойств. Это может привести к инфекции или другим заболеваниям/травмам.
- Продукт должен быть заменен и утилизирован в соответствии с протоколом, утвержденным на объекте, или руководящими принципами CDC.
- Хранить при температуре от 5°C до 35°C, избегать перегрева, защищать от прямых солнечных лучей и влаги.
- Не пытайтесь удалить твердый предмет или вдыхаемое инородное тело из задней части горла путем всасывания. Это может привести к тому, что объект будет вытеснен дальше в дыхательные пути и, возможно, вызовет полную непроходимость.
- Стерилизовано оксидом этилена.
- Срок годности: 5 лет

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ:

В случае неправильного использования может повредить мягкие ткани во время инсерции (введения).

TROGE MEDICAL GMBH не несет ответственность за последствия, вызванные неправильным использованием изделия.



STERILE EO



TROGE MEDICAL GMBH

Milchstrasse 19 - D-20148 Hamburg · Tel.: +49 40-44 18 44 0 · Fax +49 40- 410 73 03
eMail: info@trogemedical.de

