

Инструкция по применению

Фильтр HEPA

Номера по каталогу:
140130

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фильтр HEPA обладает более эффективным свойством удержания бактерий и вирусов, отличается от других типов фильтров тем, что имеет пневматическую механическую функцию фильтрации вместо электростатической.

Он прикрепляется к аппарату так же, как и бактериально-вирусный фильтр, но не исключается его установка со стороны пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Только для одноразового использования.

Перед использованием внимательно осмотрите устройство, чтобы убедиться, что его содержимое или стерильная упаковка не повреждены во время транспортировки. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** при повреждении.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Фильтры следует заменять по мере загрязнения в противном случае их следует менять каждые 24 часа. Убедитесь в правильности подключения фильтров и отсутствии утечки воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Определите место вдоха или выдоха на устройстве, к которому будет присоединен бактериально-вирусный фильтр.
2. Прикрепите соответствующим образом бактериально-вирусный фильтр к определенному вами входу устройства.
3. Убедитесь, что бактериально-вирусный фильтр правильно прикреплен к устройству.
4. После прикрепления бактериально-вирусного фильтра к устройству поместите дыхательный или анестезиологический контур на другой конец фильтра.
5. После а 24-часового использования замените бактериально-вирусный фильтр на новый.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Продукт предназначен для одноразового использования и используется во время применения. Его следует менять максимум каждые 24 часа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при комнатной температуре.

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Использованные продукты должны быть утилизированы в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.

Более подробное описание продукции см. в каталоге.