

Свидетельство о приемке

Изделие и его составные части соответствуют требованиям ТО ВУ 190666709.009-2019 (ГОСТ 16371-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки

Бригада **ОТК №2**
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район
д. Михановичи
Телефон: +375175415232



ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)**

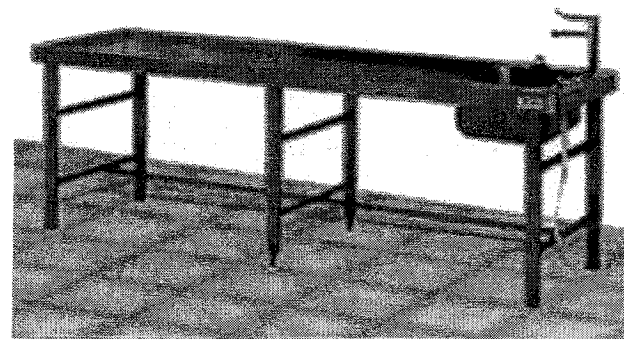

**Стол патологоанатомический
серии АТ
ГОСТ 16371-2014**

**Стол патологоанатомический
АТ-В82**

1. Назначение

Стол предназначен для эксплуатации в патологоанатомических учреждениях

2. Общая характеристика

Стол конструкционно выполнен из следующих элементов:

- каркас стола;
- рабочая поверхность с раковиной, сифоном и смесителем, душем на гибком шланге.
- регулируемые опоры (6 шт.)

Изделие поставляется в собранном виде.

Срок эксплуатации изделия – 2 года.

3. Описание

Каркас: жесткая, цельносварная конструкция из профильной нержавеющей трубы марки AISI – 304. Опоры каркаса обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0÷20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Рабочая поверхность: жесткая цельносварная конструкция из листового нержавеющей металла марки AISI – 304, сплошная, с герметичным ограждением, раковиной. Может быть укомплектован подголовником: жесткая, цельносварная конструкция, из листового нержавеющей металла марки AISI – 304, выгнутого особым способом обеспечивающим подголовнику высокую эксплуатационную надежность.

Использование нержавеющей металла позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации. Наружные поверхности стола устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделие обернуто стрейч-пленкой либо бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, и/или упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2°C при относительной влажности от 45 до 70%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

7. Технические характеристики

Артикул	Габаритные размеры	Примечание
АТ-В82	2500*740*860	

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить изменение в размеры изделия (по согласованию с заказчиком), при условии, что данные изменения не влияют на основные потребительские свойства, эргономичность и качество.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
2. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
3. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015