

## 1. Описание

Покрытие curea 150 представляет собой одноразовое покрытие для операционного стола, состоящее из слоя нетканого полипропилена и дышащей полиэтиленовой плёнки, впитывающего слоя из целлюлозы и полиакрилата и ещё одного слоя нетканого полипропиленового материала.

Покрытие curea 150 выдерживает нагрузку до 150 кг, если пациент лежит на покрытии, вытянувшись во весь рост, и его вес равномерно распределен по покрытию. Покрытие curea 150 проницаемо для рентгеновских лучей.

## 2. Показания

- супервпитывающее покрытие для операционного стола для любой области хирургии;
- перекадывание пациента с операционного стола на транспортировочные носилки;
- супервпитывающее покрытие для защиты транспортировочных носилок и операционного стола.

## 3. Противопоказания

- покрытие curea 150 не предназначено для переноски пациента в значении стандарта EN 1865-1;
- очень влажная среда (например, при применении вне помещения > 1 л жидкости);
- нагрузка свыше 150 кг и точечная нагрузка.

## 4. Применение

Положить пациента посередине покрытия на сторону с грубой текстурой без надписей. Чтобы поднять пациента, крепко взяться за длинные стороны покрытия справа и слева от пациента рядом с впитывающим слоем. Плавно и аккуратно поднять пациента, не делать рывков. Переместить пациента на желаемую поверхность настолько быстро, насколько позволяет его состояние.

## 5. Нежелательные реакции

Информации о нежелательных реакциях не поступало. Запрещается поднимать на покрытии curea 150 очень тяжелых пациентов (> 150 кг), так как покрытие может порваться.

## 6. Предостережения



Покрытие curea 150 предназначено только для однократного применения. Повторное использование запрещается во избежание возможного риска инфекции.



Запрещается использовать при нагрузке свыше 150 кг. Запрещается использовать поврежденные изделия.

## 7. Прочие замечания



Покрытие curea 150 не содержит латекса и фталатов.

## 8. Хранение



Хранить в сухом защищенном от попадания влаги месте.



Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

## 9. Утилизация



Покрытие curea 150 можно утилизировать вместе с бытовым мусором либо в соответствии с местными предписаниями. Следует учитывать специальные директивы медицинских учреждений, касающиеся утилизации (например, при наличии мультирезистентных возбудителей МРЗС, ВРЭ).



### 1. Описание

Покрывало curea 150 представляет собой стерильное одноразовое покрытие для операционного стола, состоящее из слоя нетканого полипропилена и дышащей полиэтиленовой плёнки, впитывающего слоя из целлюлозы и полиакрилата и ещё одного слоя нетканого полипропиленового материала.

Покрывало curea 150 выдерживает нагрузку до 150 кг, если пациент лежит на покрытии, вытянувшись во весь рост, и его вес равномерно распределен по покрытию. Покрывало curea 150 проницаемо для рентгеновских лучей.

### 2. Показания

- супервпитывающее покрытие для операционного стола для любой области хирургии;
- перекладывание пациента с операционного стола на транспортировочные носилки;
- супервпитывающее покрытие для защиты транспортировочных носилок и операционного стола.

### 3. Противопоказания

- покрытие curea 150 не предназначено для переноски пациента в значении стандарта EN 1865-1;
- очень влажная среда (например, при применении вне помещения > 1 л жидкости);
- нагрузка свыше 150 кг и точечная нагрузка.

### 4. Применение

Положить пациента посередине покрытия на сторону с грубой текстурой без надписей. Чтобы поднять пациента, крепко взяться за длинные стороны покрытия справа и слева от пациента рядом с впитывающим слоем. Плавно и аккуратно поднять пациента, не делая рывков. Переместить пациента на желаемую поверхность настолько быстро, насколько позволяет его состояние.

### 5. Нежелательные реакции

Информации о нежелательных реакциях не поступало. Запрещается поднимать на покрытии curea 150 очень тяжелых пациентов (> 150 кг), так как покрытие может порваться.

### 6. Предостережения



Покрывало curea 150 предназначено только для однократного применения. Повторное использование запрещается во избежание возможного риска инфекции.



Во избежание риска инфекции утилизировать поврежденные изделия либо изделия с истекшим сроком годности.



Не стерилизовать повторно.



Запрещается использовать при нагрузке свыше 150 кг. Запрещается использовать поврежденные изделия.

### 7. Прочие замечания



Покрывало curea 150 не содержит латекса и фталатов.



Изделие стерилизовано этиленоксидом.

### 8. Хранение



Хранить в сухом защищенном от попадания влаги месте.



Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

### 9. Утилизация



Покрывало curea 150 можно утилизировать вместе с бытовым мусором либо в соответствии с местными предписаниями. Следует учитывать специальные директивы медицинских учреждений, касающиеся утилизации (например, при наличии мультирезистентных возбудителей МРЗС, ВРЭ).

