

АБСОЛЮПОЛ

Универсальный высокоэффективный концентрированный препарат на основе смеси четвертичноаммонийных соединений (до 31%) с превосходными моющими свойствами. Активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, не фиксирует органические загрязнения, рабочий раствор может использоваться многократно в течение 14 суток. Канистра оснащена точным дозатором и дозировочной таблицей.

ФАСОВКА: канистра 1 л и 5 л



НАЗНАЧЕНИЕ	РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ																								
<input checked="" type="checkbox"/> Текущая дезинфекция и генеральная уборка поверхностей в помещениях, мебели, белья, посуды и др. <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция с ПСО медоборудования, включая эндоскопы, кувезы, наркозно-дыхательную аппаратуру и др. <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция ИМН с ПСО <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция оборудования и материалов в стоматологии <input checked="" type="checkbox"/> предстерилизационная очистка (ручной и механизированный способы) <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция санитарного транспорта <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция медицинских отходов класса А, Б и В <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция биологических материалов	<p>Текущая дезинфекция поверхностей:</p> <table border="1"> <tr> <td>бактерии</td> <td>0,5%</td> <td>/</td> <td>120 мин</td> </tr> <tr> <td>вирусы, вкл. гепатит в и полиомиелит</td> <td>0,5%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>туберкулёз</td> <td>0,8%</td> <td>/</td> <td>90 мин</td> </tr> </table> <p>Генеральная уборка</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,1-1,0%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> </table> <p>Инструменты</p> <table border="1"> <tr> <td>Ручной способ</td> <td>0,5%</td> <td>/</td> <td>90 мин</td> </tr> <tr> <td>механизир. способ</td> <td>1,0%</td> <td>/</td> <td>30 мин</td> </tr> </table>	бактерии	0,5%	/	120 мин	вирусы, вкл. гепатит в и полиомиелит	0,5%	/	60 мин	туберкулёз	0,8%	/	90 мин		0,1-1,0%	/	60 мин	Ручной способ	0,5%	/	90 мин	механизир. способ	1,0%	/	30 мин
бактерии	0,5%	/	120 мин																						
вирусы, вкл. гепатит в и полиомиелит	0,5%	/	60 мин																						
туберкулёз	0,8%	/	90 мин																						
	0,1-1,0%	/	60 мин																						
Ручной способ	0,5%	/	90 мин																						
механизир. способ	1,0%	/	30 мин																						

Жавель АБСОЛЮТ

Быстрорастворимые хлорные таблетки на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (84,0%), содержащие в своем составе компоненты, способствующие активации и лучшему растворению средства - адипиновую кислоту, карбонат и бикарбонат натрия и др.

ФАСОВКА: банка по 100, 300, 320 таблеток
 банка по 300, 320 таблеток с иглосъёмником
 банка по 300, 320 таблеток с активатором
 ведро 1000 таблеток с клапан-крышкой

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ																																				
<input checked="" type="checkbox"/> текущая дезинфекция и генеральная уборка поверхностей в помещениях, мебели, белья, посуды и др. <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция ИМН из коррозионно-стойких материалов, резин, пластмассы, стекла <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция санитарного транспорта <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция в очагах особо опасных инфекций <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция медицинских отходов класса А, Б и В <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция биологических выделений <input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция при анаэробных инфекциях	<p>Текущая дезинфекция поверхностей (% по акт. хлору):</p> <table border="1"> <tr> <td>бактерии</td> <td>0,015%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>вирусы</td> <td>0,015%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>туберкулёз</td> <td>0,06%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>анаэробы</td> <td>1,2%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> </table> <p>Генеральная уборка</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,015-0,1%</td> <td>/</td> <td>30-60 мин</td> </tr> </table> <p>Инструменты</p> <table border="1"> <tr> <td>вирусы</td> <td>0,06%</td> <td>/</td> <td>90 мин</td> </tr> <tr> <td>туберкулёз</td> <td>0,2%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>анаэробы</td> <td>2,0%</td> <td>/</td> <td>120 мин</td> </tr> </table> <p>Особо опасные инфекции</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>0,06-2,0%</td> <td>/</td> <td>120 мин</td> </tr> </table>	бактерии	0,015%	/	60 мин	вирусы	0,015%	/	60 мин	туберкулёз	0,06%	/	60 мин	анаэробы	1,2%	/	60 мин		0,015-0,1%	/	30-60 мин	вирусы	0,06%	/	90 мин	туберкулёз	0,2%	/	60 мин	анаэробы	2,0%	/	120 мин		0,06-2,0%	/	120 мин
бактерии	0,015%	/	60 мин																																		
вирусы	0,015%	/	60 мин																																		
туберкулёз	0,06%	/	60 мин																																		
анаэробы	1,2%	/	60 мин																																		
	0,015-0,1%	/	30-60 мин																																		
вирусы	0,06%	/	90 мин																																		
туберкулёз	0,2%	/	60 мин																																		
анаэробы	2,0%	/	120 мин																																		
	0,06-2,0%	/	120 мин																																		

