



## MiniMed Paradigm® Veo™


с остановкой подачи инсулина при низком уровне глюкозы\*

Круглосуточная защита от гипогликемии, подтвержденная клиническими испытаниями<sup>35,36</sup>

### Круглосуточная защита от гипогликемии

- Уникальная функция остановки подачи инсулина при низком уровне глюкозы автоматически приостанавливает подачу инсулина, когда уровень глюкозы достигает заданного порогового значения\*\*. Без вмешательства пользователя, подача инсулина возобновляется автоматически через два часа.

Подробно о функции остановки подачи инсулина\*\*\*

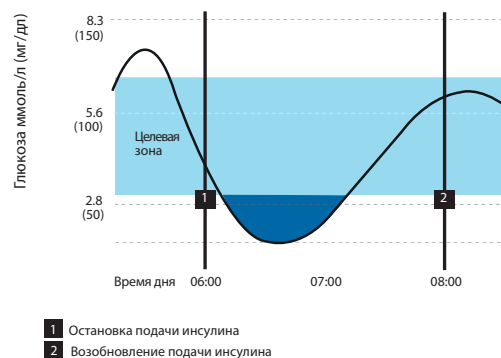

MiniMed Paradigm® Veo™ – единственная в мире система, способность которой значительно сократить количество эпизодов гипогликемии подтверждена клиническими испытаниями.<sup>35,36</sup>

### Предупреждение о возможной гипо- и гипергликемии

- Прогнозирующие предупреждающие сигналы об уровне глюкозы можно настроить на предупреждение за 5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут до достижения установленных пределов уровня глюкозы. Это позволяет своевременно предпринять коррективные меры.
- Предупреждающие сигналы о скорости изменения сообщают, когда уровень глюкозы изменяется с заранее выбранной скоростью, или быстрее.

### Расширенные возможности дозирования инсулина

- Приращение дозы с шагом 0,025 ед. помогает точнее подбирать дозу для пациентов с повышенной чувствительностью к инсулину.
- Максимальный болюс до 75 ед. и углеводный коэффициент до 15,0 единиц инсулина на хлебную единицу удовлетворяет потребности пациентов с низкой чувствительностью к инсулину, которым требуется большая доза.

## Основные характеристики

Модель помпы	MMT-554, MMT-754
Базальный режим	<ul style="list-style-type: none"> <li>Базальные дозы от 0,025 до 35,0 ед/ч</li> <li>До 48 базальных доз в день</li> <li>3 настраиваемых базальных профиля</li> <li>Установка временной базальной дозы в ед/ч или в %</li> </ul>
Болюс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Болюс от 0,025 до 75 единиц</li> <li>Углеводный коэффициент от 0,075 до 15,0 ед/XE</li> <li>Отображение уровня активного инсулина</li> <li>3 типа болюса: стандартный, квадратной волны и двойной волны</li> <li>Функция «Помощник болюса» (Bolus Wizard®)</li> </ul>
Непрерывный мониторинг глюкозы*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Остановка подачи инсулина при низком уровне глюкозы</li> <li>Прогнозирующие предупреждающие сигналы об уровне глюкозы</li> <li>Предупреждающие сигналы о скорости изменения уровня глюкозы</li> <li>3-, 6-, 12- и 24-часовые графики</li> <li>Предупреждающие сигналы о достижении верхних или нижних границ уровня глюкозы: 8 пар границ</li> <li>Стрелки скорости изменения уровня глюкозы</li> </ul>
Напоминания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Напоминание о пропущенном пищевом болюсе</li> <li>Напоминание о проверке уровня глюкозы в крови</li> <li>8 настраиваемых напоминаний</li> <li>Вибрация или звуковой сигнал</li> </ul>
Резервуары	MMT-554: 1,8 мл MMT-754: 3 мл или 1,8 мл
Габариты	MMT-554: 5,1 x 8,3 x 2,0 см MMT-754: 5,1 x 9,4 x 2,1 см
Вес	MMT-554: 95 грамм (с батареей**) MMT-754: 102 грамма (с батареей**)
Цвета	Прозрачный, серый, синий, малиновый, розовый
Гарантия	4 года

