

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЁХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ ТИП II СТЕРИЛЬНАЯ И НЕСТЕРИЛЬНАЯ

- Внутренний фильтрующий слой «мельтблаун» гарантирует эффективность бактериальной фильтрации 98%, микробиологическую чистоту (бионагрузку) не более 30 КОЭ/г, поглощает влагу, выделяемую пользователем
- Гибкий носовой фиксатор обеспечивает плотное прилегание маски к лицу
- Мягкие и эластичные ушные петли обеспечивают комфорт в применении
- Современный нетканый материал позволяет свободно дышать в маске
- Длительность ношения 2-6 часов

возможно изготовление масок медицинских однократного применения четырёхслойных на резинках Тип II

СОСТАВ : маска состоит из трех слоев нетканого материала, внутренний фиксирующий слой - «мельтблаун», поверхностная плотность маски не менее 50 г/м².

ФОРМА ВЫПУСКА : индивидуальный пакет или групповая упаковка.

СРОК ГОДНОСТИ : 5 лет с даты стерилизации /

РАЗМЕР : 17,5 см x 9,5 см изготовлением.

УПАКОВКА : 50 шт.



НАЗНАЧЕНИЕ

Маски предназначены для применения медицинским персоналом и пациентами в лечебно-профилактических учреждениях, в организациях различного профиля и в быту для защиты органов дыхания от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путём, а также для профилактики заболеваний и соблюдения требований гигиены.

АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом.
2. Удерживая маску за резинки вплотную поднести к лицу белой стороной внутрь и зафиксировать резинками в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица - и рот, и нос.
3. Придать нужную форму гибкой полоске (носовому фиксатору), обеспечив плотное прилегание маски к лицу.
4. Снять изделие, удерживая за резинку сзади, не прикасаясь к передней части маски.
5. Использованную медицинскую маску следует вложить в полиэтиленовый пакет, герметично закрыть и утилизировать как твердые коммунальные отходы (выбросить в контейнер для отходов или мусорное ведро).
6. Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.
7. При необходимости надеть новую маску, соблюдая 1-3 этапы.