

**Свидетельство о приемке**

Изделие и его составные части соответствуют требованиям  
ТО ВУ 190666709.009-2019 (ГОСТ 16371-2014) и признано годным к эксплуатации.


Дата выпуска и упаковки



# ARTINOX

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)**

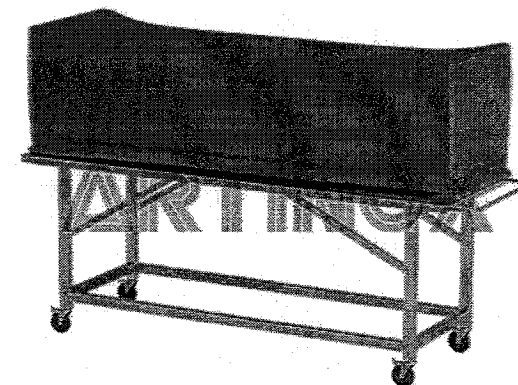

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

**Тележка патологоанатомическая  
серии AR  
ГОСТ 16371-2014**

### 1. Назначение

Тележка предназначена для использования в моргах и отделениях судебно-медицинской экспертизы.

### 2. Общая характеристика

Тележка конструктивно выполнена из следующих элементов:

- несущий каркас;
- чехол (AR-A83.1)

Срок эксплуатации изделия – 2 года.

### 3. Описание

Несущий каркас. Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из нержавеющей стали профиля 25x25 мм. ГОСТ 1050. К раме крепятся 4 самоориентирующихся колеса Ø 125 мм из серой резины с тормозом.

Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой, крепежные изделия, используемые при сборке кровати имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации.

Чехол изготовлен из медицинского кожзаменителя, устойчивого к дезобработке и УФ излучению.

Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствора перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ25644, применяемым при дезинфекции.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделие обернуто стрейч-пленкой либо бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упаковано в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотопливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2°С при относительной влажности от 45 до 70%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### 7. Технические характеристики

| Артикул  | Габаритные размеры<br>ДхШхВ, мм | Характеристика   |
|----------|---------------------------------|--|
| AR-A83.1 | 2300x650x1330                   | - материал – нержавеющая сталь;<br>- чехол съемный;<br>- 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм с тормозом;<br>Нагрузка не более 150 кг |
| AR-A83   | 2300x650x850                    | Каркас нержавеющая сталь<br>- 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (4 – с тормозом)<br>Нагрузка не более 150 кг                       |

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в размеры изделия (по согласованию с заказчиком), при условии, что данные изменения не влияют на основные потребительские свойства, эргономичность и качество.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов:

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
2. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
3. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015