


РЕВОЛЮЦИОННОЕ СОЧЕТАНИЕ
САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ОДИН АППАРАТ – МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ




VENUS VERSA

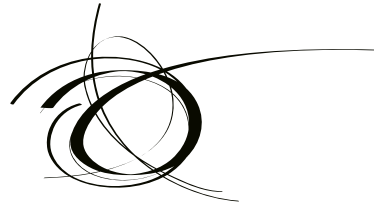

VENUS CONCEPT

DELIVERING THE PROMISE

Venus Concept – израильско-канадская компания, которая реализует передовые научные разработки, меняя традиционные представления о косметических процедурах и успешном бизнесе в области эстетической медицины. Задача Venus Concept – объединить инновационные технологии и эффективную бизнес-модель, используя персональный подход и новейшие решения.

Во главе с командой опытных менеджеров и разработчиков, всемирно известных своими достижениями в индустрии, компания Venus Concept устанавливает новые отраслевые стандарты, обеспечивая более эффективную и прибыльную деятельность благодаря запатентованным технологиям. Продукция компании востребована более чем в 50 странах. Ежегодно на оборудовании Venus Concept проводится более 3.000.000 процедур. Более подробная информация о продукции Venus Concept и ее возможностях доступна на сайте www.venusconcept.com.



www.venusconcept.com

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ



ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Лифтинг, уменьшение складок и морщин. Улучшение тонуса и тургора. Коррекция цвета и лечение сосудистых заболеваний кожи.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

Обработка любых частей тела, включая подмышки, лицо, спину и зону бикини.

БОРЬБА С АКНЕ

Лечение воспалительных элементов и препятствие возникновению новых.

ШЛИФОВКА КОЖИ

Удаление рубцов постакне, сокращение глубоких морщин, улучшение текстуры кожи.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРОВ ТЕЛА

Сокращение целлюлита, подтяжка кожи и коррекция контуров тела.

IPL-система от Venus Concept™

SR515 (Длина волны: 515-950 нм)
SR580 (Длина волны: 580-950 нм)



ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Воздействие, основанное на высокоинтенсивных световых импульсах (IPL). Точно подобранный диапазон волн позволяет эффективно бороться как с пигментными пятнами, так и с сосудистыми сеточками на коже.

HR650 / HR650 XL (Длина волны: 650 – 950 нм)
HR690 / HR690 XL (Длина волны: 690 – 950 нм)



УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

IPL-насадки с увеличенным световым пятном позволяют быстро и эффективно проводить процедуру эпиляции. Высокий ресурс лампы (более 150 000 вспышек) гарантирует длительную работу даже при большом потоке пациентов.

AC Dual (Длина волны:
415-480 нм, 630-950 нм)




ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ

Импульсная насадка AC Dual формирует бихроматичный пучок света в двух диапазонах. Синий свет нацелен на уничтожение бактерий *P.acnes*, вызывающих образование угревой сыпи, а красный - на снятие воспаления, скорейшее заживление и неоколлагенез.

Все насадки работают с использованием новейших технологий:

SMARTPULSE™

SmartPulse™ позволяет точно и с высокой интенсивностью направлять энергию на выбранный участок. Кроме того, поток фотонов подается в виде импульса квадратной формы, что означает равномерность спектрального распределения выходной мощности на протяжении всего импульса в отличие от других IPL-систем с высоким начальным уровнем энергии и ее резким снижением к концу.

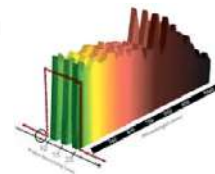

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ в режиме реального времени

Инновационная запатентованная система охлаждения замеряет температуру используемой импульсной насадки 1000 раз в секунду, корректируя интенсивность охлаждения, что обеспечивает комфорт и безболезненность при проведении процедуры.

Высокое качество криогенной установки позволяет врачу работать без технологических пауз, что делает процедуру быстрой и позволяет принять большее количество пациентов.



Радиочастотные насадки и их особенности



NANOFRACTIONAL™

Это новейшая запатентованная технология, которая обеспечивает равномерное и интенсивное распределение энергии по всем электродам.

Проникновение сигнала достигает терапевтической глубины до 500 мкм. Применение технологии SmartScan™ при использовании радиочастотной насадки NanoFractional™ дает возможность регулировать плотность энергии излучения при абляции и коагуляции в области дермы, что позволяет добиться выравнивания поверхности кожи с минимальным дискомфортом. Уникальное сочетание настроек длительности импульса и мощности подаваемой энергии позволяет работать в широком терапевтическом диапазоне, с разными типами кожи и на разных участках.



ТЕХНОЛОГИЯ SMARTSCAN™

Наконечник VenusViva NanoFractional™ содержит 160 сверхкомпактных электродов по 150x20 мкм, каждый из которых проводит энергию в 62 мДж.

Технология SmartScan™ предполагает уникальный алгоритм подбора индивидуальных схем излучения, что обеспечивает максимальную гибкость и контроль проводимых процедур.



Насадки с технологией (MP)²

НАСАДКИ DIAMONDPOLAR™ И OSTITPOLAR™

Насадка DiamondPolar™ используется для проведения процедур на лице и шее, OstiPolar™ – для процедур по телу. Обе насадки работают благодаря запатентованной технологии (MP)², которая комбинирует воздействие мультиполярных радиочастот и импульсных электромагнитных полей.



МУЛЬТИПОЛЯРНЫЙ RF-ЛИФТИНГ

Мультиполярное радиочастотное воздействие обеспечивает более быстрый и равномерный прогрев тканей пациента на значительной глубине, что позволяет достигать превосходных результатов. При проведении процедур нет необходимости в технологических перерывах, при этом пациент не испытывает болевых ощущений.

ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

Импульсные электромагнитные поля (ИЭМП), воздействующие на выбранную зону одновременно с мультиполярными радиочастотами, участвуют в стимуляции фибробластов, что в свою очередь ускоряет выработку коллагена. Кроме того, ИЭМП также стимулируют ангиогенез, создавая дополнительные пути для кровотока и улучшая циркуляцию крови в коже.

Опыт применения: результаты



Фотографии предоставил: д-р Джитит Цукер
Результат после 7 сеансов



Фотографии предоставлены Venus Concept
Результат после 2 сеансов



Фотографии предоставил: д-р Мегха Джой Шах
Результат после 5 сеансов



Фотографии предоставил: д-р Григорий Антоняк
Результат после 2 сеансов



Фотографии предоставил: д-р Тал Начлиели
Результат после 1 сеанса

Технические характеристики

Входное напряжение	100-240 В; 12,5 А; 50-60 Гц;
Габариты	65 см x 55 см x 110 см/ 25.6 дюйма x 21.7 дюйма x 43.3 дюйма (ГxШxВ)
Вес	35 кг / 77 фунтов

IPL-насадки SR515 / SR580

Длина волны	515 - 950 нм, 580 - 950 нм
Оптическая энергия	5 - 25 Дж/см ²
Длительность импульса	5 - 20 мс
Размер обрабатываемой зоны	10 мм x 30 мм
Частота повтора импульса	до 3 Гц

IPL-насадки HR650 (XL) / HR690 (XL)

Длина волны	650 - 950 нм, 690 - 950 нм
Оптическая энергия	5 - 20 Дж/см ²
Длительность импульса	20 - 50 мс
Размер обрабатываемой зоны	10 мм x 30 мм (XL: 20 мм x 30 мм)
Частота повтора импульса	до 3 Гц

IPL-насадка AC DUAL

Длина волны	415 - 480 нм, 630 - 950 нм
Оптическая энергия/Поток энергии	5 - 25 Дж/см ²
Длительность импульса	10 - 15 мс
Размер обрабатываемой зоны	10 мм x 30 мм
Частота повтора импульса	до 3 Гц

РАДИОЧАСТОТНАЯ НАСАДКА NANOFRACTIONAL™

Выходная частота волн	460 кГц
Максимальная энергия на выходе	62 мДж/элемент
Глубина абляции	500 мкм
Количество электродов	160

НАСАДКИ DIAMONDPOLAR™ И OCTIPOLAR™

Выходная частота волн	1 МГц
Выходная мощность радиочастоты	0 - 150 Вт
Количество электродов (MP) ²	до 8
Частота магнитного импульса	15 Гц
Поток импульсного магнитного поля	15 Гс

Офисы компании Venus Concept в России

г. Москва, Марксистская ул. 16, БЦ Мосаларко плаза, 7 этаж
Тел. +7 495 006 16 63

г. Санкт-Петербург, Финляндский пр. 4А, оф. 607
Тел. +7 812 309 54 21

Офисы компании Venus Concept в Казахстане

г. Астана, ул. Достык 2, Hotel Marriott, 2-й этаж
Тел. +7 717 2792 507, +7 701 5373 455



@venusconceptrussia
www.venusconcept.com/ru
www.venustreatments.com/ru

Venus Versa™ лицензирован Министерством здравоохранения Канады и одобрен Управлением FDA для проведения более 20 клинических процедур. © Все права защищены.

Venus Versa™ является торговой маркой Venus Concept и может быть зарегистрирован в отдельных странах. Радиочастотные технологии (MP)² и NanoFractional™ - запатентованные технологии, принадлежащие Venus Concept.