



ПАСПОРТ  
Устройство для снятия инъекционных игл «МИД-03»

Устройство для снятия инъекционных игл «МИД-03» (далее-устройство) предназначено для применения в медицинских учреждениях для безопасного снятия использованных инъекционных игл со шприца и их временного хранения в контейнере до момента утилизации.

Конструкция устройства позволяет использовать сменные контейнеры для сбора, временного хранения и транспортировки использованных инъекционных игл, другого колюще-режущего медицинского инструментария.

В качестве сменных контейнеров могут быть использованы пластиковые литровые емкости от дезинфицирующих, антисептических средств, жидкого мыла.

Конструкция кронштейна позволяет закрепить держатель контейнера как на горизонтальной плоскости, так и на стойке.

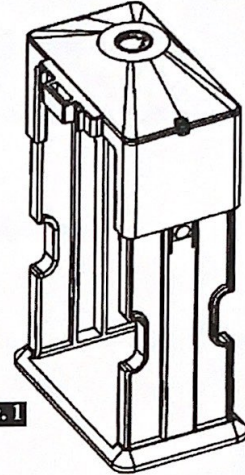


рис. 1

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Тип крепления:             | кронштейн.          |
| 2. Масса устройства:          | 0,44 кг.            |
| 3. Габаритные размеры, ДхШхВ: | 144x128,5x213,6 мм. |

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Держатель контейнера с иглосъемником (рис. 1) | 1 шт.  |
| 2. Кронштейн (рис. 2)                            | 1 шт.  |
| 3. Контейнер с крышкой (рис. 9)                  | 1 шт.  |
| 4. Маркировочная наклейка                        | 50 шт. |
| 5. Паспорт                                       | 1 шт.  |
| 6. Коробка картонная                             | 1 шт.  |

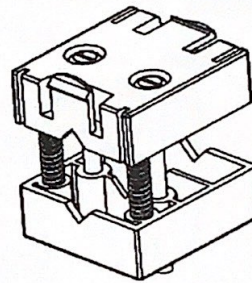



рис. 2

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

1. Выберите место установки устройства (на столе, на вертикальной стойке и др.).

 *Выбирайте место установки устройства вблизи от места проведения инъекций.*

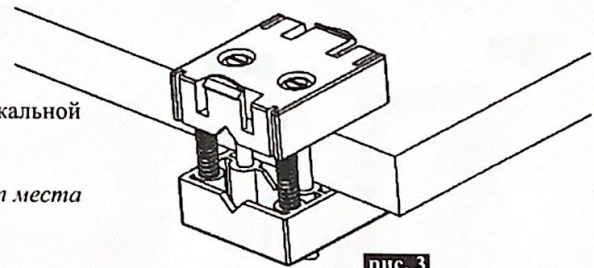


рис. 3

2. В зависимости от места установки возможны следующие варианты крепления кронштейна:

- крепление кронштейна к горизонтальной плоскости (рис.3);
- крепление кронштейна к вертикальной стойке (рис. 4).

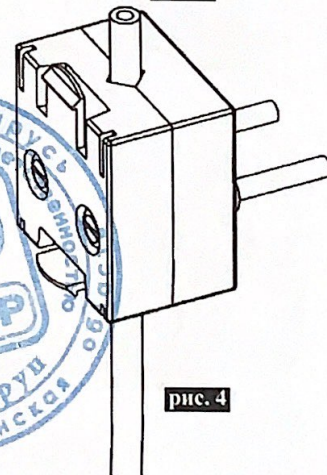


рис. 4

19 июля 2023

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО «МИДГРУП»

Зайцев И.В.



3. Присоедините держатель контейнера к кронштейну (рис. 5, 6).
4. Приготовьте необходимое количество дезинфицирующего раствора и заполните им контейнер.
5. Оттяните вниз основание держателя контейнера (рис. 7).
6. Вставьте контейнер в держатель и, придерживая его, нажмите на боковые фиксаторы (рис. 8).
7. Устройство готово к работе.

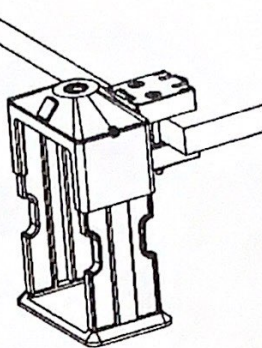


рис. 5

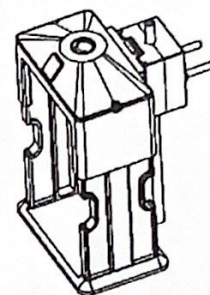


рис. 6

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Выполните инъекцию.
2. Поднесите шприц с использованной иглой к устройству и вставьте в отверстие иглосъемника.
3. Зацепите иглу (канюлю иглы) за выступ иглосъемника и потяните шприц вверх.
4. Игла отсоединена.
5. По мере необходимости или заполнения емкости контейнера его заменяют на новый согласно рекомендациям по подготовке к работе.
6. После дезинфекции аккуратно слейте дезинфицирующий раствор из контейнера и плотно закройте его крышкой.
7. Заполните графы маркировочной наклейки, а затем наклейте ее на контейнер (рис. 10).
8. Контейнер готов к транспортировке на место временного хранения для последующей утилизации.

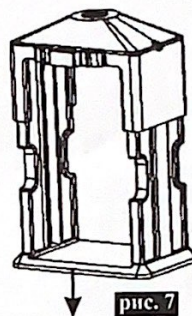


рис. 7

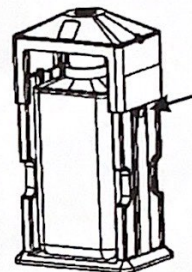


рис. 8

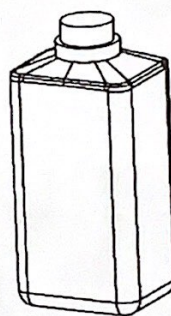


рис. 9

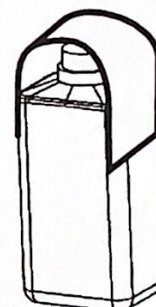


рис. 10

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте поверхности устройства ветошью, смоченной в моющем растворе. Для дезинфекции устройства применяются препараты, разрешенные для дезинфекции изделий медицинского назначения.

**⚠** Не пользуйтесь абразивными и содержащими хлор очистителями.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации устройства для снятия инъекционных игл «МИД-03» – 12 месяцев с даты реализации.
2. Срок годности устройства для снятия инъекционных игл «МИД-03» не ограничен.

### ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- приведение в негодность устройства по причине нарушений эксплуатации и технического обслуживания;
- наличие механических повреждений.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство для снятия инъекционных игл «МИД-03» соответствует техническим условиям ТУ ВУ 690777163.003-2013 и признано годным к эксплуатации.

Серийный номер

Дата изготовления

**КОПИЯ ВЕРНА**

**19 ИЮЛ 2023**

Директор ООО «МИДгруп»

Зайцев И.В.

Юридический адрес изготовителя:

Республика Беларусь, 222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 56/2-1

Почтовый адрес изготовителя: 220113, г. Минск, ул. Восточная, 129-222

Тел./факс +375 17 395 13 30, +375 17 374 43 60

e-mail: info@mid.by

