

Дезинфекция ИМН и поверхностей

АБСОЛЮЦИД окси

Уникальный кислородсодержащий препарат в форме легкорастворимого порошка, содержащий в качестве действующего вещества перекись водорода (32%(!)). Обладает максимально широким спектром микробиологической активности, отличными моющими свойствами, не фиксирует органические загрязнения, рабочий раствор не имеет запаха и может использоваться многократно в течение 5 суток.

ФАСОВКА: фольга-пакетики по 50 г, 20 штук в коробке

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ																												
<ul style="list-style-type: none"> ☑ текущая дезинфекция и генеральная уборка поверхностей в помещениях, мебели, белья, посуды и др. ☑ дезинфекция с ПСО медоборудования (включая кувезы), кроме эндоскопов ☑ дезинфекция ИМН с ПСО ☑ дезинфекция оборудования и материалов в стоматологии ☑ предстерилизационная очистка ☑ дезинфекция медицинских отходов класса А и Б ☑ дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования ☑ дезинфекция санитарного транспорта ☑ дезинфекция в очагах особо опасных инфекций 	<p>Текущая дезинфекция поверхностей:</p> <table border="0"> <tr> <td>бактерии</td> <td>0,25%</td> <td>/</td> <td>90 мин</td> </tr> <tr> <td>вирусы (вкл. гепатит В)</td> <td>2,0%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>туберкулёз</td> <td>2,5%</td> <td>/</td> <td>120 мин</td> </tr> </table> <p>Генеральная уборка</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>0,25-3,0%</td> <td>/</td> <td>60-90 мин</td> </tr> </table> <p>Инструменты</p> <table border="0"> <tr> <td>гепатит В, туберкулёз</td> <td>3,0%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>полиомиелит</td> <td>4,0%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> </table> <p>Особо опасные инфекции</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>0,5-7,0%</td> <td>/</td> <td>60-120 мин</td> </tr> </table>	бактерии	0,25%	/	90 мин	вирусы (вкл. гепатит В)	2,0%	/	60 мин	туберкулёз	2,5%	/	120 мин		0,25-3,0%	/	60-90 мин	гепатит В, туберкулёз	3,0%	/	60 мин	полиомиелит	4,0%	/	60 мин		0,5-7,0%	/	60-120 мин
бактерии	0,25%	/	90 мин																										
вирусы (вкл. гепатит В)	2,0%	/	60 мин																										
туберкулёз	2,5%	/	120 мин																										
	0,25-3,0%	/	60-90 мин																										
гепатит В, туберкулёз	3,0%	/	60 мин																										
полиомиелит	4,0%	/	60 мин																										
	0,5-7,0%	/	60-120 мин																										



АБСОЛЮЦИД дикват

Экономичный препарат широкой области применения с отличными моющими и дезинфицирующими свойствами на основе комплекса четвертичноаммонийных соединений. Обладает моющими и дезодорирующими свойствами. Рабочие растворы средства могут быть использованы многократно в течение 35 суток. Канистра оснащена точным дозатором и дозировочной таблицей.

ФАСОВКА: канистра 1 л и 5 л

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ																								
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Дезинфекция поверхностей и генуборка ☑ Дезинфекция мединструментов и эндоскопов, в т.ч. с ПСО ☑ Дезинфекция транспорта ☑ Дезинфекция воздуха и систем вентиляции ☑ Предстерилизационная очистка ☑ Дезинфекция медицинских и биоотходов ☑ Дезинфекция в стоматологии ☑ Борьба с плесенью ☑ Дезинфекция общественных учреждений 	<p>Текущая дезинфекция поверхностей:</p> <table border="0"> <tr> <td>бактерий</td> <td>0,05%</td> <td>/</td> <td>120 мин</td> </tr> <tr> <td>вирусы, вкл. полиомиелит</td> <td>0,5%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>туберкулёз</td> <td>0,5%</td> <td>/</td> <td>90 мин</td> </tr> </table> <p>Генеральная уборка</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>0,05-0,15%</td> <td>/</td> <td>15-120 мин</td> </tr> </table> <p>Инструменты</p> <table border="0"> <tr> <td>ручной способ (с ПСО)</td> <td>0,8%</td> <td>/</td> <td>60 мин</td> </tr> <tr> <td>Механизир. способ (С ПСО)</td> <td>0,8%</td> <td>/</td> <td>45 мин</td> </tr> </table>	бактерий	0,05%	/	120 мин	вирусы, вкл. полиомиелит	0,5%	/	60 мин	туберкулёз	0,5%	/	90 мин		0,05-0,15%	/	15-120 мин	ручной способ (с ПСО)	0,8%	/	60 мин	Механизир. способ (С ПСО)	0,8%	/	45 мин
бактерий	0,05%	/	120 мин																						
вирусы, вкл. полиомиелит	0,5%	/	60 мин																						
туберкулёз	0,5%	/	90 мин																						
	0,05-0,15%	/	15-120 мин																						
ручной способ (с ПСО)	0,8%	/	60 мин																						
Механизир. способ (С ПСО)	0,8%	/	45 мин																						

