

Дезинфекция * ДВУ * Стерилизация

АБСОЛЮЦИД нук

Экологически безопасный двухкомпонентный препарат (базовый раствор - перекись водорода 3% - и активатор) для дезинфекции, ДВУ и стерилизация ИМН и эндоскопов. Активно действующее вещество – надуксусная кислота (0,14%). Единственный препарат среди аналогов, обладающий следующим сочетанием: pH готового раствора - 7,0, срок годности препарата – 2 года, рабочего раствора – 2 месяца, допускается кратковременное замораживание и многократное использование.

ФАСОВКА: канистра 1л и 5л

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
<input checked="" type="checkbox"/> стерилизация ИМН, вкл. Эндоскопы.	Стерилизация эндоскопов и ИМН из различных материалов из различных резин 20 мин / 25 мин
<input checked="" type="checkbox"/> ДВУ эндоскопов, в том числе механизированным способом	ДВУ эндоскопов 5 мин
<input checked="" type="checkbox"/> дезинфекция ИМН, вкл эндоскопы при манипуляциях у инфекционного больного.	Дезинфекция (вкл. вирусы и туберкулёз) эндоскопы 5 мин стоматологические инструменты 10 мин ИМН из различных материалов 5 мин ИМН из натуральных резин 10 мин



АБСОЛЮЦИД ликвид

Современный универсальный дезпрепарат в виде концентрата на основе комбинации перекиси водорода, активированной четвертичным аммонийным соединением, и ПГМГ. Препарат максимально широкого спектра действия (дезинфекция, ДВУ, стерилизация). Рабочий раствор практически не имеет запаха, может быть использован многократно в течение 15 суток.

ФАСОВКА: канистра 1л с клапан-крышкой
канистра 5л с клапан-крышкой

НАЗНАЧЕНИЕ	РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
<input checked="" type="checkbox"/> Стерилизация, ДВУ эндоскопов и мединструментов	Текущая дезинфекция поверхностей: бактерии 0,05% / 120 мин
<input checked="" type="checkbox"/> Дезинфекция мединструментов, в т.ч. с ПСО	вирусы, вкл. полиомиелит 0,5% / 90 мин
<input checked="" type="checkbox"/> Дезинфекция поверхностей	Туберкулёз 0,7% / 90 мин
<input checked="" type="checkbox"/> Дезинфекция транспорта	анаэробы 1,5% / 60 мин
<input checked="" type="checkbox"/> Дезинфекция воздуха и систем вентиляции	Генеральная уборка 0,05-2,0% / 15-120 мин
<input checked="" type="checkbox"/> Дезинфекция медицинских и биоотходов	ДВУ эндоскопов при +20°C 6,0% / 5 мин
<input checked="" type="checkbox"/> Дезинфекция в стоматологии	Стерилизация 8,0% / 5 мин
<input checked="" type="checkbox"/> Борьба с плесенью	4,0% / 30 мин

